



# Capsule- endoscopie

---

Gebruik van de CapsoCam Plus<sup>®</sup>

De enige capsule met een  
panoramisch beeld van 360°


*Als u ijzergebrek, de ziekte van Crohn, Coeliakie, Als u ijzergebrek, de ziekte van Crohn, bloedingen of bloedarmoede hebt, kan het nodig zijn om de binnenkant van de dunne darm van uw maag-darmkanaal door uw arts te laten bekijken om uw aandoening te evalueren.*

Capso **CAM**  
PLUS<sup>®</sup>

Ontworpen voor de vrijheid van de patiënt

# Wat is capsule-endoscopie?

Capsule-endoscopie is een procedure die uw arts in staat stelt om gebruik te maken van zeer kleine camera's in een capsule die wordt ingeslikt om uw dunne darm te bekijken terwijl de capsule daardoor heen gaat. Bij gebruik van traditionele, meer invasieve endoscopische procedures is dit gebied moeilijk te bereiken en te bekijken.

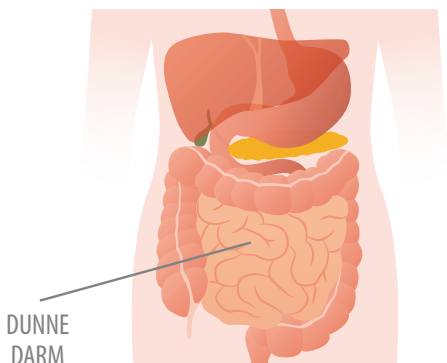

## Hoe werkt de CapsoCam Plus?

De CapsoCam Plus maakt unieke videobeelden van 360° van uw spijsverteringskanaal terwijl hij zich door uw systeem begeeft. De procedure is eenvoudig:

- *Voer een eenvoudige darmvoorbereiding uit op de dag vóór uw procedure om te zorgen voor een schoon beeld van uw darmen.*
- *Slik de capsule in met een vol glas water.*
- *Vang de capsule 8–48 uur later op met een eenvoudige opvangprocedure na de ontlasting.*
- *Breng de capsule terug naar uw arts.*
- *Uw arts zal de video bekijken en de bevindingen met u bespreken.*



---

***De CapsoCam Plus-capsule is ongeveer zo groot als een grote multivitamine en kan met een paar slokjes water worden ingeslikt.***

---

## Zal dit pijn doen?

U voelt geen pijn wanneer u de capsule inslikt of wanneer de capsule door uw spijsverteringskanaal gaat. De CapsoCam Plus-capsule moet uw lichaam op natuurlijke wijze verlaten met de ontlasting. In tegenstelling tot andere endoscopische procedures hoeft u niet te worden verdoofd.

## Hoe bereid ik me voor op het innemen van de capsule?

Voordat u uw capsule inslikt, geeft u uw arts een lijst met alle medicatie, allergieën voor medicatie, en medische aandoeningen. Uw arts laat u weten wanneer u dient te beginnen met vasten. Ook geeft hij/zij u instructies voor vóór en na de procedure. Voor een zo groot mogelijke kans op een geslaagd resultaat moet u alle instructies van uw arts nauwgezet in acht nemen.

' Mijn patiënten vinden de CapsoCam Plus-procedure bijzonder gemakkelijk om uit te voeren en zijn verbaasd hoe eenvoudig het is om de capsule in te slikken en op te vangen.'

Thomas Pachofszky, M.D.

Afdeling Gastro-enterologie, hepatologie en endoscopie  
Rudolfstiftung-ziekenhuis, Wenen, Oostenrijk

' Onze algehele ervaring [met de CapsoCam Plus] voor de patiënt is uitmuntend. Er is geen sprake van pijn, problemen of moeilijkheden en het is bijzonder eenvoudig.'

Prof. Jean Christophe Saurin, M.D.  
Edouard Herriot-ziekenhuis, Lyon, Frankrijk



## Hoe vang ik de capsule op?

Voordat u de CapsoCam Plus-capsule inslikt, krijgt u van uw arts een CapsoRetrieve-kit. Neem de kit mee naar huis en neem de gebruiksaanwijzing onmiddellijk door. Als u vragen hebt, bespreek deze dan met uw arts.

Ook wilt u de CapsoVision-website wellicht bezoeken, waar u een korte video over de procedure voor het opvangen van de capsule kunt bekijken.



*U kunt ook naar onze website gaan om een korte instructievideo over het opvangen van de CapsoCam Plus-capsule te bekijken op:*

[http://www.capsovision.com/patients/  
patient-instructional-videos](http://www.capsovision.com/patients/patient-instructional-videos)

# Met de CapsoRetrieve-kit is de capsule gemakkelijk op te vangen.



1

*Wanneer het tijd is voor een ontlasting, zet u de opvangbak op de achterkant van de toiletpot.*



2

*Giet zo nodig water in de bak om de capsule gemakkelijker te kunnen zien.*



3

*Om de capsule op te vangen zonder uw handen daarbij te gebruiken, gebruikt u de magnetische staaf om de capsule uit de bak op te vangen.*



4

*Gebruik de deksel om de capsule los te maken van de magnetische staaf en plaats de capsule in de flacon.*



5

*Vergrendel de deksel en breng de flacon terug naar de artspraktijk.*

---

Met de CapsoRetrieve-kit is ook een gebruiksaanwijzing meegeleverd die u bij de gehele procedure voor het opvangen van de capsule helpt. Lees de instructies aandachtig door en bespreek eventuele vragen met uw arts.

# Informatie over de afspraak voor de procedure

Datum van de procedure: \_\_\_\_\_

Dag van de procedure: \_\_\_\_\_

Tijdstip van de procedure: \_\_\_\_\_

## Contactgegevens:

## Informatie over risico's

Hoewel hier zelden sprake van is, gaan alle capsule-endoscopie-procedures met enig risico gepaard. Mogelijke complicaties zijn onder meer aspiratie en achterblijven van de capsule vanwege obstructie in de dunne darm. De endoscopische plaatsing kan aanvullende risico's als gevolg van de procedure met zich meebrengen. Het kan nodig zijn medisch, endoscopisch of chirurgisch in te grijpen om deze complicaties te verhelpen als zij zouden optreden. Nadat de CapsoCam Plus is ingenomen en totdat de capsule wordt uitgescheiden, mogen patiënten niet in de nabijheid van sterke elektromagnetische velden zoals MRI verkeren om letsel te voorkomen. Vraag uw arts om nadere informatie.

## Gedistribueerd door:



**CapsoVision**® CapsoVision.com