



التنظير الداخلي الكبسولي

باستخدام جهاز CapsoCam Plus®
الكبسولة الوحيدة المزودة برؤية بانورامية
بزاوية ٣٦٠°


إذا كنت تعاني من نقص الحديد أو مرض كرون أو النزيف أو فقر
الدم، فقد يحتاج طبيبك إلى رؤية الجزء الداخلي من الأمعاء الدقيقة
في القناة المعوية المعوية (GI) لديك لتقييم حالتك.

Capso CAM
PLUS®

مصمم من أجل راحة المرضى

ما هو التنظير الداخلي الكبسولي؟

التنظير الداخلي الكبسولي هو إجراء يسمح لطبيبك باستخدام كاميرات دقيقة الحجم داخل كبسولة تُبتلع وذلك لرؤية أمعائك الدقيقة أثناء مرور الكبسولة خلالها، حيث يصعب الوصول إلى هذه المنطقة ورؤيتها باستخدام إجراءات التنظير الداخلي التقليدية الباضعة بدرجة أكبر.

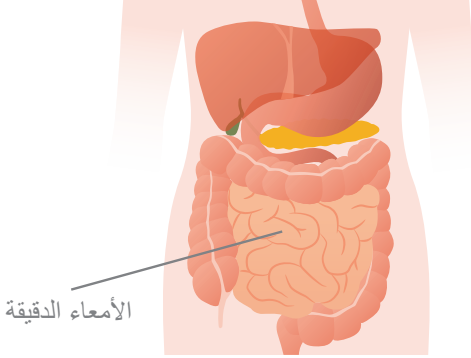

كيف يعمل جهاز CapsoCam Plus؟

يلتقط جهاز CapsoCam Plus مقطع فيديو فريداً بزاوية ٥٣٦٠ لقناتك الهضمية أثناء تحركه عبر جهازك الهضمي. هذا الإجراء سهل:

- اتبع خطوات سهلة لتجهيز الأمعاء قبل يوم واحد من قيامك بالإجراء لضمان الحصول على رؤية واضحة للأمعائك.
- ابتلع الكبسولة مع كوب كامل من الماء.
- استرجع الكبسولة لاحقاً بعد ٨ ساعات إلى ٤٨ ساعة من خلال عملية استرجاع بسيطة بعد أن تتغوط.
- أعد الكبسولة مرة أخرى إلى طبيبك.
- سيستعرض طبيبك مقطع الفيديو وسيشارك النتائج معك.

إن كبسولة CapsoCam Plus
تقارب بحجمها حجم فيتامينات
متعددة كبيرة ويمكن ابتلاعها مع
بضع رشقات من الماء.



هل سأشعر بأي ألم؟

من المفترض ألا تشعر بأي ألم عند ابتلاع الكبسولة أو أثناء تحرك الكبسولة عبر قنواتك الهضمية. ومن المفترض أن تمر وتخرج كبسولة CapsoCam Plus بشكل طبيعي مع حركة الأمعاء. وعلى عكس إجراءات التنظير الداخلي الأخرى، لن تحتاج إلى التخدير.

كيف أستعد لتناول الكبسولة؟

قبل ابتلاع كبسولتك، قدّم لطبيبك قائمة بجميع الأدوية التي تتناولها وحالات الحساسية تجاه الأدوية والحالات الطبية التي تعاني منها. سيخبرك طبيبك بالموعد الذي تبدأ فيه الصيام. وسيخبرك أيضاً بتعليمات ما قبل الإجراء وما بعده. لتهيئة أفضل فرصة لنجاح الإجراء، اتبع جميع تعليمات طبيبك بعناية.

"يجد مرضاي أن القيام بإجراء CapsoCam Plus امر سهل للغاية، ويشعرون بالدهشة من مدى بساطة عمليتي ابتلاع الكبسولة واسترجاعها."

توماس باخوفسكي، طبيب بشري
قسم طب الجهاز الهضمي وأمراض الكبد والتنظير الداخلي
مستشفى Rudolfstiftung، فيينا، النمسا

"إن تجربتنا بشكل عام [مع جهاز CapsoCam Plus] كان لها صدى ممتاز لدى المرضى. فهم لا يشعرون بالألم ولا توجد أي مشكلة أو صعوبة، والأمر بسيط للغاية."

أ. جون كريستوف سورين، طبيب بشري
مستشفى E. Herriot، ليون، فرنسا



كيف أسترجع الكبسولة؟

قبل أن تبتلع كبسولة CapsoCam Plus، سيقدم لك طبيبك مجموعة CapsoRetrieve. خذ معك المجموعة إلى المنزل وراجع تعليمات الاستخدام فوراً. إذا كانت لديك أي أسئلة، فاحرص على التحدث إلى طبيبك.

قد ترغب أيضاً في زيارة الموقع الإلكتروني لـ CapsoVision حيث يمكنك مشاهدة مقطع فيديو قصير عن عملية استرجاع الكبسولة.

يمكنك أيضاً زيارة موقعنا الإلكتروني لمشاهدة مقطع فيديو تعليمي قصير حول كيفية استرجاع كبسولة CapsoCam Plus عبر الرابط:



<http://www.capsovision.com/patients/patient-instructional-videos>

مجموعة CapsoRetrieve تجعل عملية التقاط الكبسولة أمرًا سهلاً.

عند تحريك الأمعاء والشعور بالحاجة
إلى التغوط ضع إناء استرجاع
الكبسولة على الجزء الخلفي لمقعد
المرحاض.

١



إذا لزم الأمر، صب ماء في الإناء
حتى يكون من السهل رؤية الكبسولة.

٢



لاسترجاع الكبسولة دون لمسها، استخدم
العصا المغناطيسية لالتقاط الكبسولة
من الإناء.

٣



استخدم الغطاء لفصل الكبسولة عن
العصا المغناطيسية وضعها في
القارورة.

٤



أغلق الغطاء وأعد القارورة
إلى عيادة طبيبك.

٥



تحتوي مجموعة CapsoRetrieve أيضًا على مجموعة من
الإرشادات التي توجّهك خلال عملية استرجاع الكبسولة. اقرأ
التعليمات بعناية وتحدث إلى طبيبك إذا كانت لديك أي أسئلة.

