



# Endoscopia con cápsula

---

Uso con CapsoCam Plus®

La única cápsula con una  
visión panorámica de 360°


*Si sufre una deficiencia de hierro, enfermedad de Crohn, celiacía, sangrado o anemia, es posible que el médico quiera visualizar su intestino delgado para evaluar su estado.*

Capso **CAM**  
PLUS®

Diseñado para liberar al paciente

# ¿Qué es la endoscopia con cápsula?

La endoscopia con cápsula es una intervención que permite al médico visualizar su intestino delgado a través de diminutas cámaras diminutas introducidas dentro de una cápsula que se traga. El intestino delgado es una zona difícil de alcanzar y de visualizar con las intervenciones endoscópicas tradicionales más invasivas.

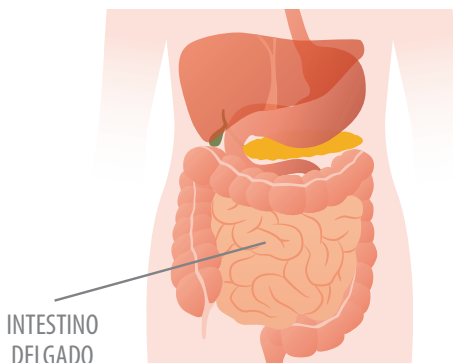

## ¿Cómo funciona CapsoCam Plus?

CapsoCam Plus graba un vídeo especial de 360° de su tubo tracto digestivo mientras lo va recorriendo.

El procedimiento es sencillo:

- *Realice una limpieza intestinal sencilla el día antes de la intervención para garantizar una visión nítida del intestino.*
- *Tráguese la cápsula bebiendo un vaso de agua entero.*
- *8-48 horas más tarde, podrá recuperar la cápsula siguiendo un sencillo proceso después de defecar.*
- *Lleve la cápsula recuperada a su médico.*
- *Su médico revisará el vídeo y compartirá con usted los hallazgos de la prueba.*



---

*La cápsula CapsoCam Plus tiene aproximadamente el tamaño de una cápsula multivitamínica grande y se puede tragar con unos sorbos de agua.*

---

## ¿Sentiré algún dolor?

No debe sentir ningún dolor al tragar la cápsula o durante el recorrido de la cápsula por el tubo digestivo. La cápsula CapsoCam Plus recorre el tubo digestivo de forma natural con los movimientos intestinales. A diferencia de otras intervenciones endoscópicas, usted no necesitará sedación.

## ¿Cómo me preparo para tragar la cápsula?

Antes de tragar la cápsula, proporcione a su médico una lista de todos los medicamentos que esté tomando e indíquelo las alergias a medicamentos y otras enfermedades. Su médico le dirá indicará cuándo debe empezar el ayuno. También le dará las instrucciones que debe seguir antes y después de la intervención. Para sacar el máximo rendimiento a la prueba, siga con atención todas las indicaciones del médico.

«A mis pacientes les resulta muy sencilla la intervención con CapsoCam Plus y se sorprenden de lo fácil que resulta tragar y recuperar la cápsula.»

Dr. Thomas Pachofszky  
Servicio de Gastroenterología, Hepatología y Endoscopia  
Hospital Rudolfstiftung, Viena (Austria)

«La experiencia general de nuestros pacientes [con CapsoCam Plus] es excelente. No causa dolor, no da problemas, no ofrece ninguna dificultad y es verdaderamente simple.»

Prof. Dr. Jean Christophe Saurin  
Hospital E. Herriot, Lyon, Francia



## ¿Cómo recupero la cápsula?

Antes de tragar la cápsula CapsoCam Plus, su médico le proporcionará el kit CapsoRetrieve. Llévese el kit a casa y repase luego las instrucciones de uso. Si tiene alguna duda, pregunte a su médico.

Puede también visitar el sitio web de CapsoVision donde podrá ver un breve vídeo sobre el proceso de recuperación de la cápsula.



*También puede visitar nuestro sitio web para ver un breve video instructivo sobre cómo recuperar la cápsula CapsoCam Plus en:*

[http://www.capsovision.com/patients/  
patient-instructional-videos](http://www.capsovision.com/patients/patient-instructional-videos)

# El kit CapsoRetrieve simplifica la recuperación de la cápsula.



1

*Cuando llegue el momento de defecar, coloque la bandeja de recogida en la parte trasera de la taza del inodoro.*



2

*Si es necesario, vierta agua en la bandeja para visualizar mejor la cápsula.*



3

*Utilice la varita magnética para recuperar la cápsula de la bandeja sin mancharse las manos.*



4

*Utilice la tapa para separar la cápsula de la varita magnética e introduzca la cápsula en el vial.*



5

*Cierre la tapa y lleve el vial a la consulta.*

---

El kit CapsoRetrieve contiene además un conjunto de instrucciones que le ayudarán a recuperar la cápsula. Lea con atención las instrucciones y pregunte a su médico cualquier duda.

# Información sobre la cita para la intervención

Fecha de la intervención: \_\_\_\_\_

Día de la intervención: \_\_\_\_\_

Hora de la intervención: \_\_\_\_\_

## Información de contacto del médico:

## Información sobre riesgos

Aunque la frecuencia sea baja, todas las intervenciones de endoscopia con cápsula conllevan algún riesgo. Las posibles complicaciones consisten en aspiración y retención de la cápsula por obstrucción del intestino delgado. La introducción endoscópica de la cápsula puede plantear riesgos adicionales. Para afrontar estas complicaciones, en caso de que aparezcan, puede requerirse una intervención médica, endoscópica o quirúrgica. Después de ingerir la CapsoCam Plus y hasta que se elimine la cápsula, los pacientes no deben acercarse a ningún campo electromagnético intenso, como el de la RM, para evitar lesiones. Pida más información a su médico.

## Distribuido por:



CapsoVision® [CapsoVision.com](http://CapsoVision.com)