



Kapslová endoskopie

pomocí kapsle CapsoCam Plus®
Jediná kapsle s 360°
panoramatickým rozhledem


Pokud máte nedostatek železa, Crohnovu nemoc, celiakii, krvácení nebo anémii, lékař může k vyhodnocení vašeho zdravotního stavu potřebovat zobrazit vnitřek tenkého střeva v gastrointestinálním traktu.

Capso **CAM**
PLUS®

Zkonstruováno k volnosti pacientů

Co je to kapslová endoskopie?

Kapslová endoskopie je procedura, při které spolknete kapsli s miniaturními kamerami a lékař si může prohlédnout tenké střevo, když jí kapsle projde. Tato oblast je obtížně dostupná a zobrazitelná tradičními, více invazivními endoskopickými procedurami.

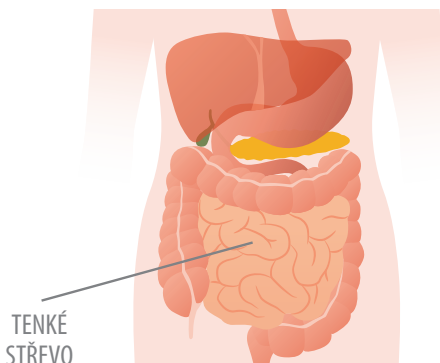

Jak CapsoCam Plus funguje?

CapsoCam Plus pořizuje při průchodu tělem jedinečné 360° video vašeho zažívacího traktu.

Postup je jednoduchý:

- *Den před samotnou procedurou provedete snadnou očistu střev, aby byla při zobrazení dobře vidět.*
- *Kapsli při spolknutí zapijete plnou sklenicí vody.*
- *Za 8–48 hodin kapsli jednoduchým postupem vyzvednete, až půjdete na stolicí.*
- *Kapsli přinesete zpět lékaři.*
- *Lékař si prohlédne video a probere s vámi nálezy.*



***Kapsle CapsoCam Plus je
přibližně velikosti velké
multivitaminové kapsle
a lze ji snadno spolknout
s několika doušky vody.***

Pocítím nějakou bolest?

Při polknutí kapsle ani jejím průchodu zažívacím ústrojím byste žádnou bolest pociťovat neměl(a). Kapsle CapsoCam Plus by měla přirozeně vyjít se stolicí. Na rozdíl od jiných endoskopických výkonů nebude potřeba žádná sedace.

Jak se připravím na polknutí kapsle?

Než spolknete kapsli, dejte svému lékaři informace o všech užívaných lécích, alergiích na léky a onemocněních. Lékař vám řekne, kdy přestat jíst. Poučí vás také, jak postupovat před procedurou a po ní. Pečlivě dodržujte všechny pokyny svého lékaře, abyste maximalizoval(a) pravděpodobnost úspěchu procedury.

„Procedura s kapslí CapsoCam Plus mým pacientům přijde velmi snadná a překvapuje je, jak jednoduché je kapsli spolknout a znovu vyzvednout.“

MUDr. Thomas Pachofszky
Oddělení gastroenterologie, hepatologie a endoskopie
Nemocnice Rudolfstiftung, Vídeň, Rakousko

„Naše zkušenosti [s kapslí CapsoCam Plus] u pacientů jsou obecně vynikající. Žádná bolest, problémy či obtíže, je to velmi jednoduché.“

prof. MUDr. Jean Christophe Saurin
Nemocnice E. Herriota, Lyon, Francie



Jak kapsli vyzvednu?

Než kapsli CapsoCam Plus spolknete, lékař vám poskytne soupravu k jejímu vyzvednutí, CapsoRetrieve Kit. Soupravu si vezměte domů a ihned si přečtete návod k použití. Budete-li mít otázky, obraťte se na svého lékaře.

Můžete také navštívit webové stránky společnosti CapsoVision a podívat se na krátké video o postupu vyzvednutí kapsle.



Můžete také navštívit naše webové stránky a podívat se na krátké video o tom, jak kapsli CapsoCam Plus vyzvednout:

<http://www.capsovision.com/patients/patient-instructional-videos>

Se soupravou CapsoRetrieve Kit je vyzvednutí kapsle snadné.



1

Až budete potřebovat jít na stoli, umístěte síto k vyzvednutí kapsle do zadní části záchodové mísy.



2

Pokud bude potřeba, propláchněte síto vodou, aby kapsli bylo lépe vidět.



3

Kapsli ze síta vyzvedněte bez dotýkání rukama magnetickou tyčkou.



4

Víčkem kapsli oddělte od magnetické tyčky a uložte ji do lahvičky.



5

Zavřete víčko a lahvičku vraťte svému lékaři.

K soupravě CapsoRetrieve Kit jsou také přibalené pokyny, které vás provedou postupem vyzvednutí kapsle. Pozorně si je přečtete a s případnými otázkami se obraťte na svého lékaře.

Informace o plánované proceduře

Datum procedury: _____

Den procedury: _____

Čas procedury: _____

Kontaktní údaje lékaře:

Informace o rizicích

Rizika jsou sice vzácná, ale do určité míry se pojí se všemi procedurami kapslové endoskopie. Možnými komplikacemi jsou vdechnutí a zadržení kapsle vzhledem k obstrukci tenkého střeva. Další rizika procedury se mohou pojít s endoskopickým zavedením. Pokud by se komplikace vyskytly, mohlo by si jejich řešení vyžádat lékařskou, endoskopickou nebo chirurgickou intervenci. V době mezi spolknutím a vyloučením kapsle CapsoCam Plus nesmí pacienti v zájmu prevence zranění být v blízkosti silných magnetických polí, např. magnetické rezonance (MR). Další informace si vyžádejte od svého lékaře.

Distribuuje:



CapsoVision[®] CapsoVision.com