



# Enteroscopia con videocapsula

---

## CapsoCam Plus<sup>®</sup>

L'unica capsula con  
visione panoramica a 360°


*Se soffre di carenza di ferro, è affetto da malattia di Crohn o da celiachia, emorragie o anemia, il Suo medico potrebbe aver bisogno di visualizzare dall'interno l'intestino tenue, per valutare meglio le Sue condizioni.*

Capso **CAM**  
PLUS<sup>®</sup>

Concepita per offrire libertà di azione al paziente

# In cosa consiste l'enteroscopia con videocapsula?

Si tratta di una procedura in cui il paziente ingerisce una capsula contenente delle piccole telecamere; man mano che la capsula transita nell'intestino tenue, registra le immagini. Questa porzione del tratto gastrointestinale è difficile da raggiungere e visualizzare con le procedure endoscopiche tradizionali, più invasive.

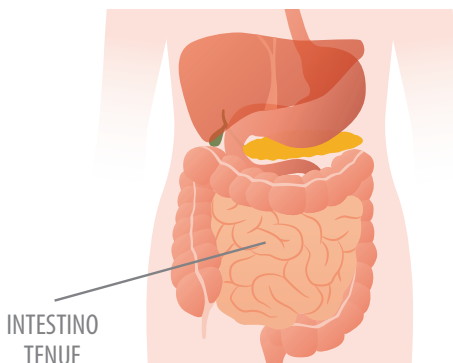

## Come funziona la capsula CapsoCam Plus?

Questo dispositivo acquisisce un video unico, a 360°, del tratto digerente, man mano che la capsula lo attraversa.

La procedura è facile:

- *Eeguire una semplice preparazione intestinale prima della procedura, per assicurare una visuale sgombra dell'intestino.*
- *Ingerire la capsula con un bicchiere pieno d'acqua.*
- *La capsula sarà espulsa con le feci 8-48 ore dopo la procedura.*
- *Restituire la capsula al medico.*
- *Il medico prenderà visione del video e La informerà dei risultati.*



---

*La capsula CapsoCam Plus ha le dimensioni all'incirca di una compressa multivitaminica e può essere ingerita con alcuni sorsi d'acqua.*

---

## Sentirò dolore?

Non dovrebbe accusare alcun dolore, né quando ingerisce la capsula né quando questa passa nel sistema digerente. La capsula CapsoCam Plus dovrebbe essere espulsa naturalmente con le feci. Diversamente da altre procedure endoscopiche, non richiede sedazione.

## Come mi devo preparare per prendere la capsula?

Prima di ingerirla, fornisca al medico un elenco di tutti i farmaci che assume, delle allergie ai farmaci e di eventuali disturbi. Il medico Le dirà quando iniziare il digiuno e Le spiegherà cosa fare prima e dopo la procedura. Per fare in modo che la procedura abbia le migliori possibilità di successo, è importante che si attenga scrupolosamente a queste istruzioni.

**“I miei pazienti riferiscono che la procedura con CapsoCam Plus è molto semplice e sono sorpresi di come sia facile da ingerire e recuperare.”**

Dott. Thomas Pachofszky,  
Reparto di Gastroenterologia, epatologia ed endoscopia  
Ospedale Rudolfstiftung, Vienna Austria

“Per quanto ci risulta, i pazienti che hanno usato la capsula CapsoCam Plus si sono trovati nel complesso molto bene. Non comporta dolore, né problemi o difficoltà. È molto semplice.”

Prof. Dott. Jean Christophe Saurin,  
Ospedale E. Herriot, Lione, Francia



## Come farò a recuperare la capsula?

Prima di ingerire la capsula CapsoCam Plus, il medico Le consegnerà anche il kit CapsoRetrieve. Lo porti a casa e legga subito le istruzioni. Per qualsiasi domanda, non esiti a rivolgersi al Suo medico.

Può anche visitare il sito web di CapsoVision, in cui troverà un breve video sul processo di recupero della capsula.

---

*Può anche visitare il nostro sito web  
e guardare un breve video che spiega  
come recuperare la capsula CapsoCam Plus:*



[http://www.capsovision.com/patients/  
patient-instructional-videos](http://www.capsovision.com/patients/patient-instructional-videos)

# Il kit CapsoRetrieve consente di recuperare agevolmente la capsula.



1

*Quando è il momento di andare in bagno, inserisca il vassoio che Le è stato consegnato nella tazza del water, appoggiandolo alla parte posteriore.*



2

*Se necessario, aggiunga dell'acqua nel vassoio, per vedere più facilmente la capsula.*



3

*Per recuperare la capsula senza usare le mani, usi il bastoncino magnetico.*



4

*Usi il coperchietto per staccare la capsula dal bastoncino magnetico e inserirla nella fiala.*



5

*Chiuda il coperchietto e restituisca la fiala all'ambulatorio medico.*

---

Il kit CapsoRetrieve contiene anche le istruzioni per assisterla nel recupero della capsula. Le legga attentamente e si rivolga al medico per ulteriori domande.

## Informazioni sull'appuntamento per la procedura

Data della procedura: \_\_\_\_\_

Giorno della procedura: \_\_\_\_\_

Ora della procedura: \_\_\_\_\_

### Recapiti del medico:

## Informazioni sui rischi

Tutte le procedure di enteroscopia con capsula possono comportare dei rischi, benché rari. Le complicazioni possibili comprendono aspirazione e ritenzione della capsula dovuta a ostruzione dell'intestino tenue. Il posizionamento endoscopico può presentare ulteriori rischi, legati alla procedura. Potrebbe essere necessario intervenire con atti medici, endoscopici o chirurgici per risolvere tali complicazioni, qualora si verificassero. Dopo l'ingestione della capsula CapsoCam Plus, e fino alla sua espulsione, i pazienti non devono avvicinarsi a campi elettromagnetici intensi, come apparecchi per risonanza magnetica, al fine di evitare lesioni. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio medico.

### Distribuito da:



**CapsoVision**<sup>®</sup> [CapsoVision.com](http://CapsoVision.com)