



# Cápsula para endoscopia

---

## Uso de CapsoCam Plus<sup>®</sup>

La única cápsula que brinda una visión panorámica de 360°


*Si padece deficiencia de hierro, enfermedad de Crohn, celiaquía, sangrado o anemia, es posible que su médico deba inspeccionar el interior del intestino delgado del tubo digestivo para evaluar su afección.*

Capso **CAM**  
PLUS<sup>®</sup>

Diseñado para favorecer la libertad del paciente

# ¿Qué es una endoscopia con cápsula?

Una endoscopia con cápsula es un procedimiento que le permite a su médico utilizar cámaras muy pequeñas dentro de una cápsula que se traga para ver el intestino delgado a medida que esta lo recorre. Es difícil llegar hasta esta zona y poder verla utilizando los procedimientos endoscópicos más invasivos tradicionales.

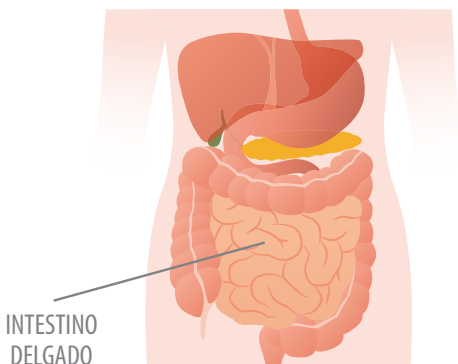

## ¿Cómo funciona CapsoCam Plus?

CapsoCam Plus graba un magnífico video en 360° de su tubo digestivo mientras la cápsula recorre su organismo. El procedimiento es sencillo:

- *Realice una simple preparación del intestino el día anterior al procedimiento para garantizar una visión nítida del mismo.*
- *Trague la cápsula con un vaso entero de agua.*
- *Recupere la cápsula entre 8 y 48 horas después, utilizando un sencillo proceso de recuperación después de su evacuación.*
- *Envíe la cápsula por correo o llévesela a su médico.*
- *El médico revisará el video y le informará los resultados.*



---

*La cápsula CapsoCam Plus tiene aproximadamente el tamaño de un comprimido multivitamínico grande, y puede tragarse con unos sorbos de agua.*

---

## ¿Sentiré algún dolor?

No debería sentir dolor al tragar la cápsula ni mientras esta recorre el tubo digestivo. La cápsula CapsoCam Plus debería expulsarse naturalmente con las heces. A diferencia de otros procedimientos endoscópicos, no requerirá sedación.

## ¿Cómo me preparo para tomar la cápsula?

Antes de tragar la cápsula, proporciónale al médico una lista de todos sus medicamentos, alergias a los medicamentos y afecciones médicas. El médico le indicará cuándo debe comenzar a ayunar. También le proporcionará instrucciones para que siga antes y después del procedimiento. Para tener las mejores posibilidades de lograr un resultado exitoso, siga atentamente las instrucciones de su médico.

**“Mis pacientes siempre se sorprenden de la facilidad con que pueden tragar la cápsula CapsoCam Plus. Y tampoco han tenido ningún problema para recuperar la cápsula”.**

Michael Bass, M.D., gastroenterólogo  
GI Specialists of Delaware, Newark, DE

“Cuando tienen la opción, mis pacientes prefieren CapsoCam Plus. Pueden venir, tragar la cápsula y reanudar sus actividades regulares sin que nadie sepa que se están realizando un procedimiento”.

Ian Storch, D.O., gastroenterólogo

Gastroenterology Consultants of Long Island, New Hyde Park, NY



## ¿Cómo recojo la cápsula?

Antes de tragar la cápsula CapsoCam Plus, su médico le entregará el kit CapsoRetrieve. Llévese el kit a su casa y lea las instrucciones de uso de inmediato. Si tiene alguna pregunta, no dude en consultar a su médico.

También puede visitar el sitio web de CapsoVision, donde podrá ver un breve video sobre el proceso de recuperación de la cápsula.



*También puede visitar nuestro sitio web para ver un breve video instructivo sobre cómo recuperar la cápsula de CapsoCam Plus en:*

<http://www.capsovision.com/patients/patient-instructional-videos>

# El kit CapsoRetrieve permite recoger la cápsula de manera simple.



1

*A la hora de evacuar, coloque la bandeja de recuperación en la parte de atrás de la taza del inodoro.*



2

*De ser necesario, vierta agua en la bandeja para que sea más fácil ver la cápsula.*



3

*Para poder recuperar la cápsula de la bandeja sin utilizar las manos, use la varilla magnética.*



4

*Use la tapa para separar la cápsula de la varilla magnética y colóquela en el vial.*



5

*Cierre la tapa y lleve el vial al consultorio de su médico.*

---

El kit CapsoRetrieve también contiene una serie de instrucciones que le guiarán en el proceso de recuperación de la cápsula. Lea las instrucciones con atención y hable con su médico si tiene alguna pregunta.

# Información del cronograma del procedimiento

Fecha del procedimiento: \_\_\_\_\_

Día del procedimiento: \_\_\_\_\_

Hora del procedimiento: \_\_\_\_\_

Información de contacto: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Información sobre riesgos

Aunque es muy poco frecuente, todo procedimiento de endoscopia con cápsula conlleva cierto nivel de riesgo. Entre las posibles complicaciones se incluye la aspiración y retención de la cápsula debido a la obstrucción del intestino delgado. La colocación del endoscopio puede plantear otros riesgos del procedimiento. Es posible que sea necesaria una intervención médica, endoscópica o quirúrgica para superar dichas complicaciones en caso de que se produzcan. Después de tragar la cápsula CapsoCam Plus y hasta que esta se excrete, los pacientes no deben acercarse a campos electromagnéticos intensos, como la resonancia magnética, a fin de evitar lesiones. Consulte a su médico para obtener más información.



CapsoVision® [CapsoVision.com](http://CapsoVision.com)