



Endoscopie par vidéo- capsule

Avec CapsoCam Plus[®]
La seule capsule offrant une vue
panoramique sur 360°


Si vous souffrez d'une carence en fer, de la maladie de Crohn, de la maladie cœliaque, de saignements ou d'anémie, votre médecin pourrait décider de vous prescrire une endoscopie par capsule pour visualiser d'éventuelles anomalies à l'intérieur de votre intestin grêle (une partie de votre appareil digestif).

Capso **CAM**
PLUS

Un gage de liberté pour les patients

Qu'est qu'une endoscopie par vidéocapsule?

L'endoscopie par vidéocapsule est une intervention qui permet au médecin de voir l'intérieur de l'intestin grêle grâce à une capsule dans laquelle est insérée une minuscule caméra et qui circule dans l'intestin après avoir été avalée. Cette zone est difficile à atteindre et à examiner avec les interventions endoscopiques traditionnelles, qui sont plus effractives.

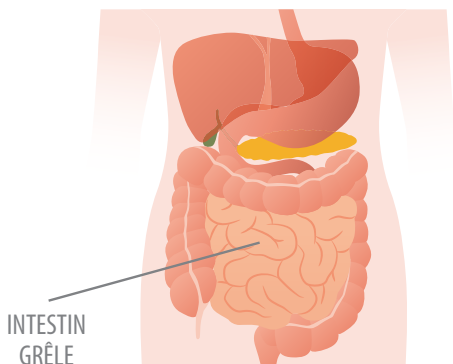

INTESTIN
GRÊLE

Comment fonctionne la capsule CapsoCam Plus?

La capsule CapsoCam Plus enregistre une vidéo de votre tube digestif sur 360° alors qu'elle circule dans votre système. L'intervention est facile :

- *La veille de l'intervention, préparez simplement l'intestin afin d'assurer une vision claire de l'intestin.*
- *Avalez la capsule avec un grand verre d'eau.*
- *Récupérez simplement la capsule entre 3 et 30 heures plus tard lors de l'évacuation des selles.*
- *Mettez la capsule à la poste ou apportez-la à votre médecin.*
- *Votre médecin visionnera la vidéo et vous communiquera les résultats.*



La capsule CapsoCam Plus est de la taille d'une grosse multi-vitamine et s'avale avec quelques gorgées d'eau.

L'intervention sera-t-elle douloureuse?

Vous ne devriez ressentir aucune douleur lors de l'ingestion de la capsule ou de son cheminement dans le tube digestif. La capsule CapsoCam Plus devrait être évacuée naturellement avec les selles. Contrairement aux autres interventions endoscopiques, elle n'exige aucune sédation n'est nécessaire

Comment dois-je me préparer à ingérer la capsule?

Avant d'avaler la capsule, remettez à votre médecin la liste de vos médicaments, de vos allergies à des médicaments et de vos problèmes de santé. Votre médecin vous dira quand commencer à jeûner. Il vous remettra également des instructions à suivre avant et après l'intervention. Pour augmenter les chances de réussite de l'intervention, suivez attentivement toutes les instructions du médecin.

« Mes patients sont toujours surpris de la facilité avec laquelle ils arrivent à avaler la capsule CapsoCam Plus. Et la récupération de la capsule ne leur cause aucun problème. »

Michael Bass, M.D., gastroentérologue
GI Specialists of Delaware, Newark, Delaware

« Lorsqu'ils ont le choix, mes patients préfèrent CapsoCam Plus. Il leur suffit de venir au bureau pour avaler la capsule, puis ils reprennent leurs activités sans que personne ne sache qu'une intervention est en cours. »

Ian Storch, D.O., gastroentérologue
Gastroenterology Consultants of Long Island, New Hyde Park,
New York



Comment dois-je récupérer la capsule?

Avant d'avaler la capsule CapsoCam Plus, votre médecin vous remettra la trousse de récupération CapsoRetrieve. Emportez la trousse avec vous et lisez tout de suite les instructions. Si vous avez des questions, assurez-vous d'en parler à votre médecin.

Vous voudrez peut-être visiter le site Web de CapsoVision pour voir une brève vidéo du processus de récupération de la capsule.



Vous pouvez également visiter notre site Web pour visionner une courte démonstration de la récupération de la capsule CapsoCam Plus à l'adresse suivante :

<https://capsovision.com/international/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/>

La trousse CapsoRetrieve facilite la récupération de la capsule.



1

Le moment venu d'évacuer des selles, placez le plateau de récupération sur la partie arrière de la cuvette de toilette.



2

Au besoin, versez de l'eau dans le plateau pour repérer plus facilement la capsule.



3

Pour récupérer la capsule dans le plateau sans y toucher, utilisez la tige magnétique.



4

Utilisez le couvercle pour séparer la capsule de la tige magnétique et déposez-la dans le flacon.



5

Verrouillez le couvercle et apportez le flacon au cabinet de votre médecin.

La trousse CapsoRetrieve contient également des instructions pour vous aider à suivre le processus de récupération de la capsule. Lisez attentivement les instructions et consultez votre médecin si vous avez des questions.

Renseignements sur l'intervention prévue

Date de l'intervention : _____

Jour de l'intervention : _____

Heure de l'intervention : _____

Coordonnées du médecin : _____

Information sur les risques

Toutes les interventions d'endoscopie par vidéocapsule comportent des risques, bien que les complications soient rares. L'aspiration et la rétention de la capsule en raison d'une occlusion de l'intestin grêle sont de possibles complications. La mise en place de l'endoscope peut présenter d'autres risques liés à l'intervention. Une intervention médicale, endoscopique ou chirurgicale pourrait être nécessaire pour traiter ces complications, le cas échéant. Entre l'ingestion et l'évacuation de la capsule CapsoCam Plus, les patients devraient éviter de se trouver à proximité d'un champ électromagnétique puissant, comme un appareil d'IRM, afin d'éviter des lésions. Pour plus de renseignements, consultez votre médecin.



CapsoVision
empowering through innovation

CapsoVision.com

Distribué par **PENTAX** Medical