



# Kapsel- Endoskopie

mit der CapsoCam Plus®

Die einzige Kapsel, die eine  
360-Grad-Panoramasicht ermöglicht


*Bei Eisenmangel, Morbus Crohn, Zöliakie, Blutungen,  
oder Anämie kann ein Arzt ein Kapsel-Endoskopie-  
Verfahren verschreiben, um potenzielle Anomalien  
zu visualisieren, einschließlich im Dünndarm (Teil des  
Gastrointestinaltrakts).*

Capso **CAM**  
PLUS

Mehr Flexibilität für Patienten

# Was ist die Kapselendoskopie?

Die Kapselendoskopie ist ein Verfahren, mit dem ein Arzt mithilfe winziger Kameras in einer Kapsel, die vom Patienten geschluckt wird, eine Ansicht des Dünndarms erhält, während die Kapsel den Magen-Darm-Trakt passiert. Dieser Bereich ist mit konventionellen, invasiveren endoskopischen Verfahren schwer zu erreichen und per Bildgebung darzustellen.

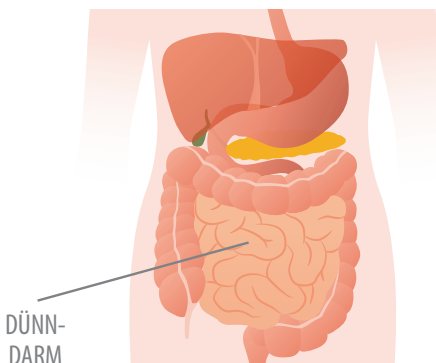

## Wie funktioniert die CapsoCam Plus?

Die CapsoCam Plus-Kapsel zeichnet ein einzigartiges 360-Grad-Video Ihres Magen-Darm-Trakts auf, während sie durch Ihren Körper transportiert wird.

Das Verfahren ist einfach:

- *Befolgen Sie am Tag vor dem Verfahren die Anweisungen zur Darmreinigung, um eine saubere Sicht Ihres Darms zu gewährleisten.*
- *Schlucken Sie die Kapsel mit einem vollen Glas Wasser.*
- *Bergen Sie die Kapsel nach 3-30 Stunden mit Hilfe eines einfachen Bergungsverfahrens nach Ihrem Stuhlgang.*
- *Bringen Sie die Kapsel in die Arztpraxis zurück.*
- *Ihr Arzt wird sich das Video ansehen und Ihnen den Befund mitteilen.*



---

**Die CapsoCam Plus-Kapsel ist ungefähr so groß wie eine große Multivitaminkapsel und kann mit etwas Wasser geschluckt werden.**

---

## Werde ich Schmerzen verspüren?

Beim Schlucken der Kapsel oder während des Transports der Kapsel durch Ihren Verdauungstrakt verspüren Sie in der Regel keine Schmerzen. Die CapsoCam Plus-Kapsel wird normalerweise auf natürlichem Wege mit dem Stuhl ausgeschieden. Im Gegensatz zu anderen endoskopischen Verfahren ist keine Sedierung erforderlich.

## Wie bereite ich mich auf das Schlucken der Kapsel vor?

Geben Sie vor dem Schlucken der Kapsel Ihrem Arzt eine Liste all Ihrer Arzneimittel, Allergien gegen Arzneimittel und Erkrankungen. Ihr Arzt wird Ihnen mitteilen, wann Sie mit dem Fasten beginnen müssen. Außerdem gibt er Ihnen Anweisungen, die vor und nach dem Verfahren zu befolgen sind. Um ein möglichst aussagekräftiges Untersuchungsergebnis zu erhalten, müssen Sie alle Anweisungen Ihres Arztes genau einhalten.

**„Meine Patienten finden das CapsoCam Plus-Verfahren sehr einfach und sind überrascht, wie leicht es ist, die Kapsel zu schlucken und zu bergen.“**

Dr. Thomas Pachofszky

Abteilung für Gastroenterologie, Hepatologie und Endoskopie  
Krankenanstalt Rudolfstiftung Wien, Österreich

„Unsere Erfahrung [mit CapsoCam Plus] für den Patienten ist insgesamt hervorragend. Es gibt keine Schmerzen, keine Probleme, keine Schwierigkeiten, und das Verfahren ist denkbar einfach.“

Prof. Dr. Jean Christophe Saurin  
Hôpital Edouard Herriot, Lyon, Frankreich



## Wie berge ich die Kapsel?

Bevor Sie die CapsoCam Plus-Kapsel schlucken, gibt Ihnen Ihr Arzt das CapsoRetrieve-Set. Nehmen Sie das Set mit nach Hause und lesen Sie die Gebrauchsanweisung umgehend durch. Kontaktieren Sie unbedingt Ihren Arzt, falls irgendwelche Fragen aufkommen sollten.

Sie sollten auch nach Möglichkeit die CapsoVision-Website besuchen, wo Sie ein kurzes Video zum Bergen der Kapsel ansehen können.



***Sie können auch unsere Website besuchen, um ein kurzes Informationsvideo anzusehen, wie man die CapsoCam Plus-Kapsel birgt:***

<https://capsovision.com/international/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/>

# Mit dem CapsoRetrieve-Set ist die Bergung der Kapsel ganz leicht.



1

*Wenn Sie Stuhldrang verspüren, setzen Sie den Auffangbehälter auf den hinteren Teil des WC-Beckens auf.*



2

*Gießen Sie nach Bedarf Wasser in den Behälter, damit die Kapsel besser sichtbar ist.*



3

*Die Kapsel wird mit dem Magnetstab ohne direkten Kontakt mit den Händen aus dem Behälter entnommen.*



4

*Streifen Sie die Kapsel mit dem Deckel vom Magnetstab in das Fläschchen ab.*



5

*Verriegeln Sie den Deckel und bringen Sie das Fläschchen in die Arztpraxis.*

---

Das CapsoRetrieve-Set enthält außerdem detaillierte Anweisungen zur Bergung der Kapsel. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und sprechen Sie mit Ihrem Arzt, falls Sie Fragen haben.

# Angaben zum Termin des Verfahrens

Datum des Verfahrens: \_\_\_\_\_

Tag des Verfahrens: \_\_\_\_\_

Uhrzeit des Verfahrens: \_\_\_\_\_

## Kontaktdaten des Arztes:

## Angaben zu Risiken

Alle Kapselendoskopieverfahren sind – wenngleich selten – mit gewissen Risiken verbunden. Mögliche Komplikationen sind u. a. Aspiration und Verbleib der Kapsel (Retention) aufgrund von Dünndarmverschluss. Weitere Risiken während des Verfahrens können sich durch die endoskopische Platzierung ergeben. Sollten diese Komplikationen auftreten, sind eventuell medizinische, endoskopische oder chirurgische Maßnahmen zu deren Behebung erforderlich. Nach dem Schlucken der CapsoCam Plus-Kapsel und bis zum Ausscheiden der Kapsel dürfen Patienten zum Vermeiden von Verletzungen keinen starken elektromagnetischen Feldern ausgesetzt werden, wie es etwa bei einem MRT der Fall ist. Für weitere Informationen fragen Sie bitte Ihren Arzt.

## Vertrieb durch:



**CapsoVision**  
*empowering through innovation*

CapsoVision.com