



# Nội Soi Bằng Viên Nang

---

Sử dụng CapsoCam Plus®  
Viên nang duy nhất có góc nhìn  
toàn cảnh 360°


Nếu bạn bị thiếu sắt, mắc bệnh Crohn, bệnh Celiac, xuất huyết hoặc thiếu máu, bác sĩ có thể chỉ định thủ thuật nội soi bằng viên nang để quan sát được những bất thường có thể có bên trong ruột của bạn (một phần thuộc đường tiêu hóa (GI)).

Capso **CAM**  
PLUS®

Được thiết kế để đem đến sự tự do cho bệnh nhân

# Nội soi bằng viên nang là gì?

Nội soi bằng viên nang là một thủ thuật cho phép bác sĩ sử dụng một camera tí hon đặt trong một viên nang được nuốt qua miệng để quan sát ruột non của bạn khi viên nang này đi qua. Khu vực này khó thăm khám và quan sát bằng thủ thuật nội soi truyền thống vốn mang tính xâm lấn nhiều hơn.

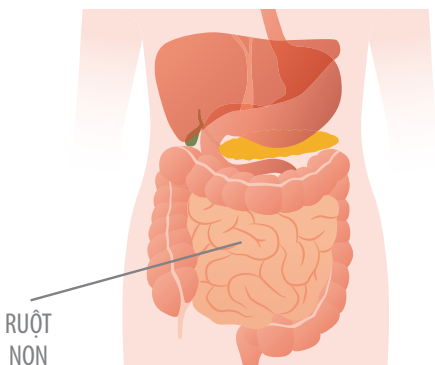

## CapsoCam Plus hoạt động như thế nào?

CapsoCam Plus quay lại một đoạn video 360° duy nhất của đường tiêu hóa khi nó đi qua hệ tiêu hóa của bạn. Thủ thuật này rất dễ thực hiện:

- Tuân theo các bước chuẩn bị đường ruột để thực hiện vào trước ngày thực hiện thủ thuật để đảm bảo thu được hình ảnh ruột sạch sẽ.
- Nuốt viên nang với một cốc nước đầy.
- Thu hồi lại viên nang từ 3-30 giờ sau đó bằng một quy trình thu hồi đơn giản sau khi bạn đi đại tiện.
- Gửi qua bưu điện hoặc đem viên nang trở lại cho bác sĩ.
- Bác sĩ sẽ kiểm tra video và chia sẻ kết quả với bạn.



---

*Viên nang CapsoCam Plus có kích thước bằng khoảng một viên vitamin tổng hợp lớn và có thể nuốt được với vài ngụm nước.*

---

## Tôi có cảm thấy đau không?

Bạn sẽ không cảm thấy đau khi nuốt viên nang hoặc khi viên nang đi qua đường tiêu hóa của bạn. Viên nang CapsoCam Plus sẽ được bài tiết tự nhiên khi bạn đi đại tiện. Khác với các thủ thuật nội soi khác, bạn sẽ không cần phải dùng thuốc an thần.

## Tôi chuẩn bị để lấy viên nang như thế nào?

Trước khi nuốt viên nang, hãy cho bác sĩ biết danh sách tất cả các thuốc, tình trạng dị ứng và các bệnh trạng. Bác sĩ sẽ cho bạn biết khi nào cần bắt đầu nhịn đói. Bác sĩ cũng sẽ cho bạn biết hướng dẫn trước và sau khi thực hiện thủ thuật. Để xác suất có kết quả thành công cao nhất, hãy tuân thủ cẩn thận tất cả các hướng dẫn của bác sĩ.

*“Bệnh nhân của tôi luôn ngạc nhiên vì việc nuốt viên nang CapsoCam Plus quá dễ dàng. Và việc thu hồi lại viên nang cũng không khó khăn gì cho bệnh nhân.”*

Bác sĩ tiêu hóa Michael Bass

Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa thuộc Delaware, Newark, DE

“ Khi được lựa chọn, bệnh nhân của tôi thích dùng CapsoCam Plus hơn. Bệnh nhân có thể đến, nuốt viên nang và quay trở lại sinh hoạt bình thường mà không ai biết rằng họ đang thực hiện một thủ thuật.”

Bác sĩ tiêu hóa, bác sĩ xương khớp, Ian Storch

Cố vấn về tiêu hóa thuộc Long Island, New Hyde Park, NY



## Tôi thu hồi viên nang như thế nào?

Trước khi bạn nuốt viên nang CapsoCam Plus, bác sĩ sẽ cung cấp cho bạn một bộ kit CapsoRetrieve. Đem bộ kit về nhà và xem Hướng dẫn sử dụng ngay lập tức. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy nhớ nói chuyện với bác sĩ.

Cũng có thể bạn muốn xem trang web CapsoVision, trên đó có một đoạn video tóm tắt quy trình thu hồi viên nang.



*Bạn cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi để xem một đoạn video hướng dẫn ngắn về cách thu hồi viên nang CapsoCam Plus tại:*

<https://capsovision.com/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/>

# Bộ kit CapsoRetrieve giúp việc thu hồi viên nang trở nên đơn giản.



1

Khi đến giờ đi đại tiện, đặt Thau thu hồi vào phía sau bồn vệ sinh.



2

Nếu cần, đổ nước vào thau để dễ nhìn thấy viên nang hơn.



3

Để thu hồi mà không cần dùng tay, sử dụng đũa nam châm để hút viên nang lại từ trong thau.



4

Sử dụng nắp để gỡ viên nang ra khỏi đũa nam châm và đặt viên nang vào lọ.



5

Khóa nắp lại và gửi trả lọ về phòng mạch của bác sĩ.



HOẶC

Hoặc nếu bác sĩ cung cấp cho bạn một bao thư FedEx® đã trả trước cước phí bưu điện, đặt lọ vào phong bao và gửi tại bất kỳ cơ sở nào của FedEx.

---

Bộ kit CapsoRetrieve cũng có các hướng dẫn cho bạn về các bước trong quy trình thu hồi viên nang. Đọc kỹ hướng dẫn và trao đổi với bác sĩ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

# Thông Tin Đặt Hẹn Làm Thủ Thuật

Ngày thực hiện thủ thuật: \_\_\_\_\_

Thứ (trong tuần) thực hiện thủ thuật: \_\_\_\_\_

Thời gian thực hiện thủ thuật: \_\_\_\_\_

Thông tin liên hệ:

---

---

---

**Thận trọng:** Luật liên bang giới hạn thiết bị này chỉ được bán bởi hoặc bán theo y lệnh của nhân viên y tế có giấy phép hành nghề.

## Thông Tin Về Rủi Ro

Mặc dù hiếm gặp, tất cả các quy trình nội soi bằng viên nang đều có một số rủi ro. Các biến chứng có thể bao gồm bị hút và viên nang bị mắc kẹt do tắc nghẽn ruột non. Việc thực hiện nội soi có thể có thêm nguy cơ từ thủ thuật. Có thể cần tới biện pháp can thiệp y tế, nội soi hoặc phẫu thuật để giải quyết những biến chứng này nếu chúng xảy ra. Sau khi uống CapsoCam Plus cho đến khi viên nang được bài tiết ra ngoài, bệnh nhân không được ở gần bất kỳ vùng có từ trường mạnh nào, chẳng hạn như MRI, để tránh tổn thương. Hỏi bác sĩ để có thêm thông tin.



CapsoVision®

CapsoVision.com