



# آندوسکوپی کیسولی

با استفاده از CapsoCam

Plus® تنها کیسولی که امکان دید  
پانورمایی 360° را فراهم می‌کند


اگر از فقر آهن، بیماری کرون، بیماری سلیاک، خونریزی یا  
کم‌خونی رنج می‌برید، ممکن است پزشک شما بخواهد رویه  
آندوسکوپی کیسولی را برای مشاهده ناهنجاری‌های احتمالی داخل  
روده کوچک (بخشی از دستگاه گوارش (GI)) شما تجویز کند.

Capso **CAM**  
PLUS

برای راحتی و آسایش بیمار طراحی شده است

## آندوسکوپی کپسولی چیست؟

آندوسکوپی کپسول رویه‌ای است که به پزشک شما اجازه می‌دهد از دوربین‌های کوچک داخل یک کپسول بلعیده شده استفاده کند تا روده کوچک شما را هنگام عبور کپسول از آن مشاهده کند. دسترسی به این ناحیه و دیدن آن با استفاده از رویه‌های آندوسکوپی تهاجمی سنتی دشوار است.

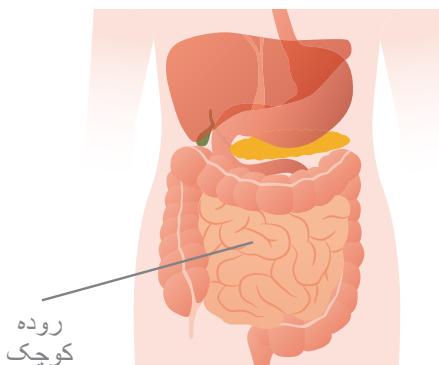

## CapsoCam Plus چگونه عمل می‌کند؟

CapsoCam Plus هنگام عبور از سیستم بدن شما، یک فیلم 360° درجه‌ای منحصر به فرد از دستگاه گوارش شما ضبط می‌کند. این رویه آسان است:

- برای اطمینان از دید تمیز از روده یک روز قبل از انجام این رویه، نحوه آماده‌سازی روده را دنبال کنید.
- کپسول را با یک لیوان کامل آب قورت دهید.
- کپسول را 3-30 ساعت بعد با استفاده از یک روند بازیابی ساده پس از اجابت مزاج خود بازیابی کنید.
- کپسول را از طریق پست برای پزشک خود ارسال کنید یا خودتان آن را تحویل دهید.
- پزشک شما فیلم را بررسی می‌کند و یافته‌ها را با شما به اشتراک می‌گذارد.

---

**کپسول CapsoCam Plus**  
تقریبا به اندازه یک مولتی ویتامین  
بزرگ است و می‌توان آن را با چند  
جرعه آب بلعید.

---



## آیا دردی را احساس خواهیم کرد؟

هنگام بلعیدن کپسول یا در حین عبور کپسول از دستگاه گوارش خود، نباید هیچ گونه دردی را احساس کنید. کپسول CapsoCam Plus باید با حرکات طبیعی روده حرکت کند. برخلاف سایر روش‌های آندوسکوپی، شما به آرام‌بخش نیاز نخواهید داشت.

## چگونه برای دریافت و بلعیدن کپسول آماده شوم؟

قبل از بلعیدن کپسول، فهرستی از تمام داروها، حساسیت‌های دارویی و شرایط پزشکی خود را به پزشک خود ارائه دهید. پزشک تان به شما می‌گوید از چه زمانی باید ناشتا باشید. همچنین دستورالعمل‌های قبل و بعد از رویه استفاده را به شما ارائه می‌دهد. برای افزایش احتمال دستیابی به نتیجه موفقیت‌آمیز، تمام دستورالعمل‌های پزشک خود را با دقت دنبال کنید.

"بیماران من همیشه از این موضوع تعجب می‌کنند که چطور به راحتی می‌توانند کپسول CapsoCam Plus را بلعند. و بازیابی کپسول برای آن‌ها بی‌دردسر بوده است."

مایکل باس (Michael Bass)، دکترای پزشکی، متخصص گوارش  
متخصصان GI از Delaware, Newark, DE

"در صورت داشتن حق انتخاب، بیماران من ترجیح می‌دهند از CapsoCam Plus استفاده کنند. آن‌ها می‌توانند مراجعه کنند، کپسول را بلعند و فعالیت‌های منظم خود را از سر بگیرند بدون اینکه کسی بداند آن‌ها تحت انجام یک رویه قرار دارند."

ایان استورچ (Ian Storch)، D.O.، متخصص گوارش  
مشاوران گوارش لانگ آیلند (Long Island)، New Hyde Park, NY



## چگونه کپسول را (پس از بلعیدن) بازیابی کنم؟

قبل از بلعیدن کپسول CapsoCam Plus، پزشک شما کیت CapsoRetrieve را در اختیارتان قرار می‌دهد. کیت را به خانه ببرید و دستورالعمل‌های استفاده را بلافاصله مرور کنید. اگر سوالی داشتید، حتماً با پزشک خود صحبت کنید.

همچنین ممکن است بخواهید از وبسایت CapsoVision دیدن کنید که در آن می‌توانید یک فیلم کوتاه در مورد بازیابی کپسول را تماشا کنید.

همچنین می‌توانید به وبسایت ما به آدرس زیر نیز مراجعه کنید تا یک فیلم آموزشی کوتاه در مورد نحوه بازیابی کپسول CapsoCam Plus مشاهده کنید:



[https://capsovision.com/patient-resources/  
what-to-expect-with-capsocam/](https://capsovision.com/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/)

# کیت CapsoRetrieve باعث ساده‌تر شدن دریافت کپسول می‌شود.

وقتی زمان اجابت مزاج فرا رسید،  
ظرف بازیابی را در پشت کاسه  
توالت قرار دهید.

1



در صورت نیاز، داخل ظرف آب  
بریزید تا دیدن کپسول راحت‌تر شود.

2



جهت بازیابی بدون استفاده از دست، از  
چوب مغناطیسی برای گرفتن  
کپسول در ظرف استفاده کنید.

3



با استفاده از درپوش، کپسول را از  
چوب مغناطیسی جدا کنید و آن را  
درون ویال قرار دهید.

4



درپوش را محکم کنید و  
ویال را به مطب پزشک  
خود برگردانید.

5



یا اگر پزشک شما یک پاکت از پیش  
پرداخت شده FedEx® را به شما  
ارائه کرده است، ویال را داخل  
آن قرار دهید و آن را به یکی از  
محل‌های FedEx تحویل دهید.

یا



همچنین کیت CapsoRetrieve شامل مجموعه‌ای از  
دستورالعمل‌ها است که شما را در روند بازیابی کپسول راهنمایی  
می‌کند. دستورالعمل‌ها را به دقت بخوانید و اگر سوالی دارید با  
پزشک خود صحبت کنید.

# اطلاعات مربوط به تعیین دریافت کپسول

تاریخ انجام: \_\_\_\_\_

روز انجام: \_\_\_\_\_

زمان انجام: \_\_\_\_\_

اطلاعات تماس:

---

---

---

تذکر: قانون فدرال عرضه این وسیله را به فروش توسط یک متخصص مجاز پزشکی یا تحت سفارش او محدود کرده است.

## اطلاعات مربوط به خطرات

اگرچه وقوع آن نادر است، اما همه رویه‌های آندوسکوپی کپسولی خطراتی را به همراه دارند. عوارض احتمالی شامل آسیب‌رسانی و احتباس کپسول به دلیل انسداد روده کوچک است. جاگذاری آندوسکوپی ممکن است خطرات دیگری نیز در این رویه به همراه داشته باشد. در صورت بروز این عوارض ممکن است به مداخله پزشکی، آندوسکوپی یا جراحی برای رفع آن‌ها نیاز شود. پس از مصرف CapsoCam Plus و تا زمان دفع کپسول، بیماران نباید در نزدیکی هیچگونه میدان الکترومغناطیسی قوی مانند MRI قرار گیرند تا از آسیب‌دیدگی جلوگیری شود. اطلاعات بیشتر را از پزشک خود درخواست کنید.

CapsoVision.com

