

예시* CapsoCam Plus® 장정결 준비 지침

*깨끗한 소장 및 적합한 시술 결과를 얻기 위한 환자 준비를 위해 의료진에게 예시로 제공되는 지침입니다. 의료진은 장정결 준비 지침을 지시할 때 각 환자의 개별적 상태를 고려해야 합니다. 알려진 운동성 질환(예: 위 배출의 지연, 위 울체, 잦은 변비, 대장내시경 검사 시 접근성 문제 등)을 가지고 있는 환자는 보다 적극적이거나 수정된 장정결 준비가 필요할 수 있습니다.

이 장정결 준비는 세 가지 주요 엔드포인트인 (1) 최적의 소장 시각화, (2) 신속한 캡슐 통과 및 (3) 환자의 캡슐내시경 검사의 임상 결과 극대화라는 목표를 가지고 회수를 용이하게 하는 묶은 변을 달성하기 위해 의료진이 환자와 함께 개발했습니다.

CapsoCam Plus®를 사용한 캡슐내시경 검사를 위한 환자 장정결 준비 지침

오전 섭취 일정

*주의사항: 경구용 철분 보충제를 복용하는 경우, 검사 4일 전부터 중단하시기 바랍니다.

캡슐내시경 검사는 다음으로 예정되어 있습니다: _____

주소: _____

요일 _____ 날짜 _____ 시간 _____

검사 전날

요일:	아침 식사는 평소처럼 드시되 점심 식사는 가볍게 드십시오. 그 이후, 검사 전까지 주간/야간 동안 맑은 유동식을 시작하십시오. (붉은색 음료는 마시지 않음.)
요일: 시간: 저녁 7:00	폴리에틸렌 글리콜(MiraLAX®, ClearLax, PureLax, GaviLax, LavaClear 브랜드) 7컵(119g)을 32온스 물 또는 붉은색이 아닌 전해질 대체 음료와 혼합해 모든 내용물을 마십니다.
요일: 시간: 밤 9:30	밤 9시 30분에 8온스의 물과 잘 혼합한 0.6ml의 Mylicon® 드롭스를 섭취합니다. 이는 위장관의 가스를 줄여줍니다. 밤 10시 이후에는 아무 것도 마시지 마십시오. 약물과 함께 소량의 물 음용은 허용됩니다.

검사 당일

요일: 시간: 아침	의사가 필요하다고 판단하는 경우를 제외하고 캡슐을 삼킨 후 2시간까지 기다렸다가 약물과 함께 소량의 물을 섭취합니다.
요일: 시간:	예정된 캡슐 삼키기 2시간 전에 폴리에틸렌 글리콜(MiraLax, ClearLax 등) 1컵(17g)을 물 한 잔 또는 붉은색이 아닌 전해질 대체 음료와 혼합합니다. 폴리에틸렌 글리콜 병 뚜껑은 표시된 선까지 채웠을 때 17g의 분말을 측정할 수 있도록 표시가 되어있는 측정 캡입니다.
요일: 시간:	병원/진료소에 도착합니다.
시간:	8온스의 물에 0.6ml의 Mylicon 드롭스를 혼합해 CapsoCam Plus 캡슐을 삼킵니다.
시간:	캡슐을 삼킨 후 2시간 후에 맑은 유동식을 다시 섭취합니다.
시간:	캡슐을 삼킨 후 4시간 후, 폴리에틸렌 글리콜(MiraLax, ClearLax 등) 17g을 물 한 잔 또는 붉은색이 아닌 전해질 대체 음료와 혼합해 내용물을 모두 마십니다.
시간:	마지막 용량의 폴리에틸렌글리콜(MiraLax, ClearLax 등)을 마신 후 언제든지 가벼운 점심을 즐길 수 있습니다. 점심 식사 메뉴를 기록해 주십시오. _____ 저녁은 평소대로 드십시오. 더 이상 식이제한이 필요하지 않습니다.

중요 환자 정보

- 최상의 결과를 위해 지침을 엄격히 따르십시오. 캡슐이 통과하는 데 일반적으로 3~30시간이 소요됩니다. 캡슐 섭취 후 72시간이 지나도 캡슐이 통과되지 않으면 담당 의사에게 문의하십시오.
- 회수 영상 지침을 보려면 다음을 참조하십시오.

<https://capsovision.com/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/>



- 이 검사의 반복을 피하기 위해 캡슐을 회수할 때까지 회수 지침을 준수하십시오. 캡슐을 회수할 때까지 제공된 회수 팬을 계속 사용하십시오.
- 지시에 따라 캡슐을 담당 의사에게 반납하십시오.

캡슐 반납: 담당 의료제공자가 선택한 2가지 옵션 중 1가지

- 집에 가져갈 키트에 미리 라벨이 붙은 패딩 봉투가 제공된 경우 캡슐을 캡슐용기 안에 넣습니다. 캡슐용기의 뚜껑을 잘 닫았는지 확인하고, 캡슐용기를 지퍼백에 넣어 밀봉합니다. 캡슐용기가 들어 있는 지퍼백을 패딩 봉투 안에 넣고 봉인한 후, FedEx 투입함 또는 실제 FedEx 영업소에 제출합니다.
- 캡슐용기 안에 캡슐을 넣습니다. 캡슐용기의 뚜껑을 잘 닫았는지 확인합니다. 정상 근무 시간 동안 캡슐을 의사 진료소에 반납합니다.

궁금한 사항은 다음 번호로 진료소에 전화해 주십시오: _____

장정결제 구입

주의사항: 장정결제는 다양한 크기로 제공됩니다. 장정결제를 구입할 때 전체 장정결을 위해 충분한 양을 구입했는지 확인하십시오.

폴리에틸렌 글리콜(MiraLAX®, ClearLax, PureLax, GaviLax, LavaClear 브랜드). 최소 153그램이 들어 있는 제품으로 구입합니다 (약간 남을 수도 있음).

Mylicon 드롭스 - 가능한 가장 작은 병... 총 1.2ml만 필요합니다.