

## CapsoCam Plus® מוסטער\* גיידליינז פֿאַר צוגרייטונג

\* דאָקטאָרס זענען געגעבן ינסטראַקשאַנז פֿאַר אַ פּאַציענט צוגרייטונג וואָס וועט מיסטאָמע רעזולטאַט אין אַ ריין קליין באַוועל און אַ מצליח פּראָצעדור. רעצעפט פון פרעפ ינסטראַקשאַנז זאָל נעמען די פּאַציענט 'ס ספּעציפּיש סיטואַציע אין חשבון. עס קען זיין נייטיק צו פירן אַ מער אַגרעסיוו אָדער מאַדאָפּייד פרעפ צו פּאַטיענץ וואָס האָבן באַווסט מאָטיליטי פּראָבלעמס (אַזאַ ווי דילייד מאַגן עמפּטיינג, גאַסטריק ריטענשאַן, ריקעראַנט פּאַרשטאָפּונג, שווער אַקסעסאָביליטי בעשאַס קאָלאָנאָסקאָפּי, אאז"וו).

ווען רופאים דיזיין דעם פּראָטאָקאָל מיט זייער פּאַטיענץ אין זינען, דריי ערשטיק אַבדזשעקטיווז זענען יידענאַפּייד: די אָביעקטיוו פון דיין פּאַציענט 'ס קאַפּסל ענדאָסקאָפּי לערנען איז צו מאַקסאַמיז די קליניש אַוטקאָם דורך דערגרייכן דריי צילן: (1) פּאַסטאַסט קאַפּסל דורכפּאַר; (2) לאַסאַסט בענקל צו לאַזן ריטרווואַל; און (3) אַפּטימאַל וויזשוואַלאַזיישאַן פון די קליין באַוועל.

# גידליינד פֿאַר קאַפּסולע ענדאָסקאָפּי מיט CapsoCam Plus® : צוגרייטונג פֿאַר פּאַציענט

## מאָרגן ינטייק באַראַטונג

\*נאטיץ: ביטע האַלטן גענומען קיין מויל אייזן ביילאגעס פיר פול טעג איידער די פּראָצע אויב איר נעמען זיי.

די צייט פון דיין קאַפּסל ענדאָסקאָפּי אָפּעראַציע איז:

אַדרעס:

טאָג \_\_\_\_\_ טאָג \_\_\_\_\_ צייט \_\_\_\_\_

### [ב] פּרעפּעראַטיווע טאָג

טאָג:	האַבן אַ טיפּיש פּרישטיק און אַ ליכט לאַנטש דערנאָך. דערנאָך אָנהייבן דיין קלאָר פּליסיק דיעטע די נאַכט איידער די כירורגיע און פֿאַר די מנוחה פון דעם טאָג. (קיין רויט בעוורידזשיז פון קיין מין).
טאָג: צייט: PM 7:00	קאַמביין 32 אונסעס פון וואַסער אָדער אַ ניט-רויט עלעקטראָליטע פּאַרבייט טרינקען מיט זיבן (7) קאַפּפּולז (119 גראַמז) פון פּאַליעטאַלין גלייקאָל (בנימצא אונטער די MiraLAX®, ClearLax, PureLax, GaviLax און LavaClear באַנדרז). טרינקען די גאַנצע געמיש.
טאָג: צייט: PM 9:30	נעמען 0.6 מל פון Mylicon® טראפנס מיט 8 אַז פון וואַסער, רעכט געמישט, וועגן 9:30 PM. ווי אַ רעזולטאַט, עס וועט זיין ווייניקערע גי טראַקט באַבאַלז. גאַרנישט צו פאַרנוצן פאַראַנגענהייט 10:00. עס איז פּאַסיק צו נעמען מעדאַקיישאַן מיט קליינטשיק סיפּס פון וואַסער.

### [ב] פּראָצעדור טאָג

טאָג: צייט: פּרימאָרגן	אויב דיין דאָקטער ינסטראַקט איר אַנדערש, וואַרטן צוויי שעה נאָך ינדזשעסטינג די קאַפּסל איידער איר נעמען דיין רעצעפט. נאָך דעם, טרינקען קליין סיפּס פון וואַסער.
טאָג: צייט:	מישן איין קאַפּסל (17 גראַמז) פון פּאַליעטאַלין גלייקאָל (אַזאַ ווי ClearLax, MiraLax, אאז"ו) מיט אַ פּול גלאַז פון וואַסער אָדער אַ ניט-רויט עלעקטראָליטע פּאַרבייט טרינקען צוויי (2) שעה איידער די סקעדזשולד קאַפּסל ינדזשעסטישאַן צייט. די מעסטן היטל אויף די שפיץ פון די פּאַליעטאַלין גלייקאָל פּלאַש איז דעזיגנייט צו האַלטן 17 גראַמז פון פּודער ווען אַנגעפּילט אַרויף צו די ספּעסאַפּייד מדרגה.
טאָג: צייט:	דערגרייכן די קליניק אָדער אָפיס.
צייט:	<b>[ב] טרינקט 8 אונסעס וואַסער און שלינגען איין קאַפּסאָקאַם פּלוס קאַפּסל ( )</b> צוזאַמען מיט 0.6 קק פון מיליקאָן טראפנס.
צייט:	צוויי שעה נאָך סוואַלאַוינג די קאַפּסל, זופּן די פּשוט געטראַנק אַמאַל מער.
צייט:	מישן 17 גראַמז פון פּאַליעטאַלין גלייקאָל (ClearLax, MiraLax, אאז"ו) מיט אַ פּול גלאַז פון וואַסער אָדער אַ ניט-רויט עלעקטראָליטע פּאַרבייט טרינקען פיר (4) שעה נאָך ינדזשעסטינג די קאַפּסל, און טרינקען די גאַנצע אינהאַלט.
צייט:	נאָך קאַנסומינג די לעצטע דאָסאָדזש פון פּאַליעטאַלין גלייקאָל, איר זענט פּריי צו האַבן אַ ליכט לאַנטש אין קיין צייט (ClearLax, MiraLax, עטק.). ביטע צושטעלן די מאַלצייט וואַס איר האַט, דאָקומענט.
צייט:	פֿאַר מיטאָג, עסן ווי געוויינטלעך. ניט מער דייאַטערי ריסטריקשאַנז זענען פּאַרלאַנגט.

- אדכיר ענג צו די אינסטרוקציעס פֿאַר אָפּטימאַל אַוטקאָמז. עס יוזשאַוואַלי נעמט 3-30 שעה פֿאַר די קאָפּסל צו פֿאַרן. ין 72 שעה פון ינדזשעסטינג די קאָפּסל, אויב איר האָט נישט דורכגעגאַנגען די קאָפּסל, קאָנטאַקט דיין דאָקטער.
- באַזוכן צו זען די ריטרווואַל וו 2 < ווידעא אינסטרוקציעס.



<https://capsovision.com/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/>

- ביטע נאָכגיין דיין ריטרווואַל אינסטרוקציעס ביז די קאָפּסל איז ריטרוווד אין סדר צו פֿאַרמיידן אַ יבערבאַזערונג פון דעם לערנען. ניצן די אַרײַנגערעכנט ריטרווואַל פֿאַן ריפּיטידלי ביז די קאָפּסל איז געפֿונען.
- ווי דירעקטעד, צוריקקומען די קאָפּסל צו דיין דאָקטער.

### געבן צוריק די קאָפּסל: 1 פון די 2 אַלטערנאַטיוועס וואָס דיין געזונט זאָרגן שפּייזער האט אויסגעקליבן

- שטעלן די קאָפּסל אין די קאָפּסל קאָנטיינער אויב דיין נעמען-היים קיט כולל אַ פֿאַר-לייבאַלד פֿאַדיד קאָנווערט. מאַכן זיכער די קאָפּסל קאָנטיינער ס דעקל איז פֿאַרמאַכט איידער פּלייסינג עס אין די פֿאַרשעלעסלען-שלאָס זעקל און סילינג עס. פֿאַקן די קאָפּסל קאָנטיינער אין די זיפּלאַקק זעקל, פּלאַמבע דעם קאָנווערט און פּערסנאַלי באַפּרייען עס צו קיין פּעדעקס קאָפּ קעסטל אָדער פּעדעקס אָפּיס.
- שטעלן די קאָפּסל ין די קאָנטיינער מענט פֿאַר קאָפּסאַלז. מאַכן זיכער אַז די דעקל פון די קאָפּסל קאָנטיינער איז פֿאַרמאַכט. ווען די אָפּיס פון דער דאָקטער איז אָפּן, ביטע צוריקקומען די קאָפּסל דאָרט.

ביטע רופן אונדזער אָפּיס צו: \_\_\_\_\_ אויב איר האָט קיין פּראָגעס, ביטע קאָנטאַקט

### אַקווירירינג די רעצעפט מעדיצין

**נאטיץ:** פרעפּ מעדאַקיישאַן איז בנימצא אין קייפּל סיזעס: מאַכן זיכער אַז איר קויפן גענוג פּריפּעראַטאָרי מעדאַקיישאַן איידער איר קויפן.

פּאַליעטאַלין גלייקאַל (בראַנדד MiraLAX®, ClearLax, PureLax, GaviLax, LavaClear). קריגן אַ סלוי אָדער קאָנטיינערד וואָס האַלטן אַ מינימום פון 153 גראַמז (איר וועט מיסטאַמע האַבן לעפּטאַווער).

דער קלענסטער פּלאַש וואָס איז מעגלעך איז מיליקאַן דראָפּס. איר דאַרפֿן בלויז 1.2 מיליאַליטערד אין גאַנץ.