



التنظير الداخلي الكبسولي

باستخدام جهاز
CapsoCam Plus®

الكبسولة الوحيدة المزودة برؤية بانورامية
بزاوية 360°


إذا كنت تعاني نقص الحديد أو مرض كرون أو الداء البطني أو
نزيفاً أو فقر دم، فقد يرغب طبيبك في وصف إجراء التنظير
الداخلي الكبسولي لرؤية الاضطرابات المحتملة داخل أمعائك
الدقيقة (جزء من قناتك الهضمية (GI)).

Capso CAM
PLUS

مصمّم من أجل راحة المرضى

ما هو التنظير الداخلي الكبسولي؟

التنظير الداخلي الكبسولي هو إجراء يسمح لطبيبك باستخدام كاميرات دقيقة توضع بداخل كبسولة تُبتلع من أجل رؤية أمعائك الدقيقة في أثناء مرور الكبسولة خلالها. فهذه المنطقة يصعب الوصول إليها ورؤيتها باستخدام إجراءات التنظير الداخلي التقليدية الباضعة بدرجة أكبر.

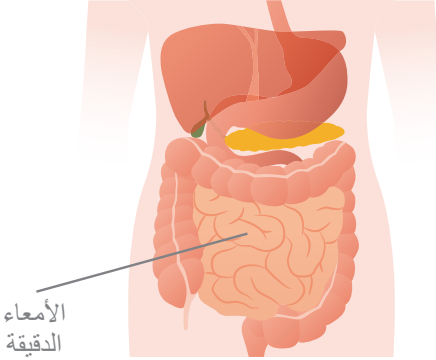

كيف تعمل كبسولة CapsoCam Plus؟

تلتقط كبسولة CapsoCam Plus مقطع فيديو فريدًا بزاوية 360° لقناتك الهضمية أثناء تحركها عبر جهازك الهضمي. يتميز الإجراء بسهولة:

- اتبع طريقة سهلة لتجهيز الأمعاء في اليوم السابق لخضوعك للإجراء لضمان الحصول على رؤية واضحة للأمعائك.
- ابتلع الكبسولة مع كوب كامل من الماء.
- استرجع الكبسولة بعد 3 ساعات إلى 30 ساعة من خلال عملية استرجاع بسيطة بعد أن تتغوط.
- أرسل الكبسولة بالبريد إلى طبيبك أو خذها إلى عيادته مرة أخرى.
- سيستعرض طبيبك مقطع الفيديو وسيشارك النتائج معك.

إن كبسولة CapsoCam Plus
تقريباً في حجم كبسولة كبيرة من
كبسولات الفيتامينات المتعددة،
ويمكن ابتلاعها مع بضع رشقات
من الماء.

هل سأشعر بأي ألم؟

يُفترض ألا تشعر بأي ألم عند ابتلاع الكبسولة أو في أثناء تحرك الكبسولة عبر قنواتك الهضمية. ومن المفترض أن تمر كبسولة CapsoCam Plus وتخرج بشكل طبيعي مع البراز. وعلى عكس إجراءات التنظير الداخلي الأخرى، لن تحتاج إلى التخدير.

كيف أستعد لتناول الكبسولة؟

قبل ابتلاع كبسولتك، قدّم لطبيبك قائمة بجميع الأدوية التي تتناولها وحالات الحساسية تجاه الأدوية والحالات الطبية التي تعانيها. سيخبرك طبيبك بالموعد الذي تبدأ فيه الصيام. وسيزودك أيضاً بتعليمات ما قبل الإجراء وما بعده. لتهيئة أفضل فرصة لنجاح الإجراء، اتبع جميع تعليمات طبيبك بعناية.

"دائماً ما يتفاجأ مرضاي بمدى سهولة ابتلاع
كبسولة CapsoCam Plus. وكانت عملية
استرجاع الكبسولة سلسة بالنسبة لهم".

مايكل باس، طبيب بشري، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي
عيادة GI Specialists of Delaware، نيوارك، ديلاوير

"عندما يكون لمرضاى الخيار، فإنهم يفضلون كبسولة CapsoCam Plus. فيمكنهم القدوم وابتلاع الكبسولة واستكمال أنشطتهم المعتادة من دون أن يعرف أحد أنهم يخضعون لإجراء".

أيان ستورث، اختصاصى تقويم العظام، اختصاصى أمراض الجهاز الهضمى
عيادة Gastroenterology Consultants of Long Island،
نيو هايد بارك، نيويورك



كيف أسترجع الكبسولة؟

قبل أن تبتلع كبسولة CapsoCam Plus، سيقدم لك طبيبك مجموعة CapsoRetrieve. خذ المجموعة معك إلى المنزل واستعرض تعليمات الاستخدام فورًا. إذا كانت لديك أي أسئلة، فاحرص على التحدث إلى طبيبك.

قد ترغب أيضًا في زيارة موقع CapsoVision الإلكتروني، حيث يمكنك مشاهدة مقطع فيديو قصير يشرح عملية استرجاع الكبسولة.

يمكنك أيضًا زيارة موقعنا الإلكتروني لمشاهدة مقطع فيديو تعليمي قصير حول كيفية استرجاع كبسولة CapsoCam Plus، وذلك عبر الرابط:



<https://capsovision.com/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/>



تجعل مجموعة CapsoRetrieve عملية التقاط الكبسولة أمرًا سهلاً.

1 عند الشعور بالحاجة إلى التغوط، ضع إناء استرجاع الكبسولة على الجزء الخلفي لمقعد المراحيض.

1



2 إذا لزم الأمر، فصب ماء في الإناء حتى يكون من السهل رؤية الكبسولة.

2



3 لاسترجاع الكبسولة من دون لمسها، استخدم العصا المغناطيسية لالتقاط الكبسولة من الإناء.

3



4 ضع الكبسولة في حاوية الكبسولة. يمكنك استخدام غطاء الحاوية لفصل الكبسولة عن العصا المغناطيسية.

4



5 أغلق الغطاء وأعد حاوية الكبسولة إلى عيادة طبيبك.

5



أو إذا زوّدك طبيبك بظرف FedEx® مدفوع مسبقًا، فضع حاوية الكبسولة بداخله وضعه في صندوق أي موقع من مواقع FedEx.

أو



تحتوي مجموعة CapsoRetrieve أيضًا على مجموعة من الإرشادات التي توجّهك خلال عملية استرجاع الكبسولة. اقرأ التعليمات بعناية وتحدث إلى طبيبك إذا كانت لديك أي أسئلة.

معلومات موعد الإجراء

تاريخ الإجراء: _____

يوم الإجراء: _____

وقت الإجراء: _____

معلومات التواصل: _____

تنبيه: يحظر القانون الفيدرالي بيع هذا الجهاز إلا من قبل أحد ممارسي الرعاية الصحية المرخصين أو بطلب منه.

معلومات عن المخاطر

تنطوي جميع إجراءات التنظير الداخلي الكبسولي على بعض المخاطر، رغم أن حدوثها نادر. وتتضمن المضاعفات المحتملة استنشاق الكبسولة واحتباسها بسبب انسداد الأمعاء الدقيقة. وقد يتسبب وضع المنظار الداخلي في مخاطر إضافية للإجراء. قد يلزم إجراء تدخل طبي أو جراحي أو تدخل بالمنظار الداخلي لعلاج هذه المضاعفات إذا حدثت. بعد تناول كبسولة CapsoCam Plus وحتى إخراجها، ينبغي ألا يقترب المريض من أي حقول كهرومغناطيسية قوية مثل حقل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لتجنب الإصابة. اسأل طبيبك لمعرفة المزيد من المعلومات.



CapsoVision.com

CapsoVision

empowering through innovation