



Cápsula para endoscopia

Uso de CapsoCam Plus[®]

La única cápsula que brinda una visión panorámica de 360°


Si usted padece deficiencia de hierro, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, sangrado o anemia, es posible su médico le indique un procedimiento de endoscopia con cápsula para visualizar posibles anomalías en el interior del intestino delgado (una parte del tubo digestivo).

Capso **CAM**
PLUS

Diseñado para favorecer la libertad del paciente

¿Qué es una endoscopia con cápsula?

Una endoscopia con cápsula es un procedimiento que le permite a su médico utilizar cámaras muy pequeñas dentro de una cápsula que se traga para ver el intestino delgado a medida que esta lo recorre. Es difícil llegar hasta esta zona y poder verla utilizando los procedimientos endoscópicos más invasivos tradicionales.

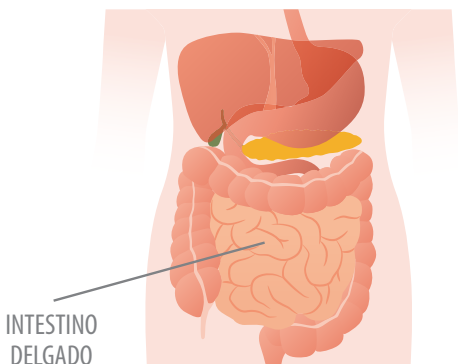

¿Cómo funciona CapsoCam Plus?

CapsoCam Plus graba un magnífico video en 360° de su tubo digestivo mientras la cápsula recorre su organismo. El procedimiento es sencillo:

- *Realice una simple preparación del intestino el día anterior al procedimiento para garantizar una visión nítida del mismo.*
- *Trague la cápsula con un vaso entero de agua.*
- *Recupere la cápsula entre 3 y 30 horas después, utilizando un sencillo proceso de recuperación después de su evacuación.*
- *Envíe la cápsula por correo o llévesela a su médico.*
- *El médico revisará el video y le informará los resultados.*



La cápsula CapsoCam Plus tiene aproximadamente el tamaño de un comprimido multivitamínico grande, y puede tragarse con unos sorbos de agua.

¿Sentiré algún dolor?

No debería sentir dolor al tragar la cápsula ni mientras esta recorre el tubo digestivo. La cápsula CapsoCam Plus debería expulsarse naturalmente con las heces. A diferencia de otros procedimientos endoscópicos, no requerirá sedación.

¿Cómo me preparo para tomar la cápsula?

Antes de tragar la cápsula, proporciónale al médico una lista de todos sus medicamentos, alergias a los medicamentos y afecciones médicas. El médico le indicará cuándo debe comenzar a ayunar. También le proporcionará instrucciones para que siga antes y después del procedimiento. Para tener las mejores posibilidades de lograr un resultado exitoso, siga atentamente las instrucciones de su médico.

“Mis pacientes siempre se sorprenden de la facilidad con que pueden tragar la cápsula CapsoCam Plus. Y tampoco han tenido ningún problema para recuperar la cápsula”.

Michael Bass, M.D., gastroenterólogo
GI Specialists of Delaware, Newark, DE

“Cuando tienen la opción, mis pacientes prefieren CapsoCam Plus. Pueden venir, tragar la cápsula y reanudar sus actividades regulares sin que nadie sepa que se están realizando un procedimiento”.

Ian Storch, D.O., gastroenterólogo

Gastroenterology Consultants of Long Island, New Hyde Park, NY



¿Cómo recojo la cápsula?

Antes de tragar la cápsula CapsoCam Plus, su médico le entregará el kit CapsoRetrieve. Llévase el kit a su casa y lea las instrucciones de uso de inmediato. Si tiene alguna pregunta, no dude en consultar a su médico.

También puede visitar el sitio web de CapsoVision, donde podrá ver un breve video sobre el proceso de recuperación de la cápsula.



También puede visitar nuestro sitio web para ver un breve video instructivo sobre cómo recuperar la cápsula de CapsoCam Plus en:

<https://capsovision.com/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/>



El kit CapsoRetrieve permite recoger la cápsula de manera simple.



1

A la hora de evacuar, coloque la bandeja de recuperación en la parte de atrás de la taza del inodoro.



2

De ser necesario, vierta agua en la bandeja para que sea más fácil ver la cápsula.



3

Para poder recuperar la cápsula de la bandeja sin utilizar las manos, use la varilla magnética.



4

Coloque la cápsula en el recipiente para la cápsula. Puede utilizar la tapa del recipiente para separar la cápsula de la varilla magnética.



5

Cierre la tapa y lleve el recipiente con la cápsula al consultorio de su médico.



0

O bien, si su médico le proporcionó un sobre de FedEx® prepagado, coloque allí el recipiente con la cápsula y entréguelo en cualquier sucursal de FedEx.

El kit CapsoRetrieve también contiene una serie de instrucciones que le guiarán en el proceso de recuperación de la cápsula. Lea las instrucciones con atención y hable con su médico si tiene alguna pregunta.

Información del cronograma del procedimiento

Fecha del procedimiento: _____

Día del procedimiento: _____

Hora del procedimiento: _____

Información de contacto: _____

Precaución: La legislación federal establece que solo un profesional de la salud con licencia puede vender o indicar el uso de este dispositivo.

Información sobre riesgos

Aunque es muy poco frecuente, todo procedimiento de endoscopia con cápsula conlleva cierto nivel de riesgo. Entre las posibles complicaciones se incluye la aspiración y retención de la cápsula debido a la obstrucción del intestino delgado. La colocación del endoscopio puede plantear otros riesgos del procedimiento. Es posible que sea necesaria una intervención médica, endoscópica o quirúrgica para superar dichas complicaciones en caso de que se produzcan. Después de tragar la cápsula CapsoCam Plus y hasta que esta se excrete, los pacientes no deben acercarse a campos electromagnéticos intensos, como la resonancia magnética, a fin de evitar lesiones. Consulte a su médico para obtener más información.



CapsoVision
empowering through innovation

CapsoVision.com