



Endoscopia por cápsula

com CapsoCam Plus[®]

A única cápsula com uma vista
panorâmica de 360°


Se sofrer de carência de ferro, doença de Crohn, doença celíaca, hemorragia ou anemia, o seu médico poderá prescrever um procedimento de endoscopia por cápsula para visualizar possíveis anomalias dentro do seu intestino delgado (uma parte do seu o trato gastrointestinal (GI)).

Capso **CAM**
PLUS

Concebido para proporcionar liberdade aos doentes

O que é a endoscopia por cápsula?

A endoscopia por cápsula é um procedimento que permite ao seu médico utilizar pequenas câmaras dentro de uma cápsula que é ingerida para visualizar o seu intestino delgado à medida que esta o atravessa. Esta é uma área de difícil acesso e visualização quando se utilizam procedimentos endoscópicos tradicionais mais invasivos.

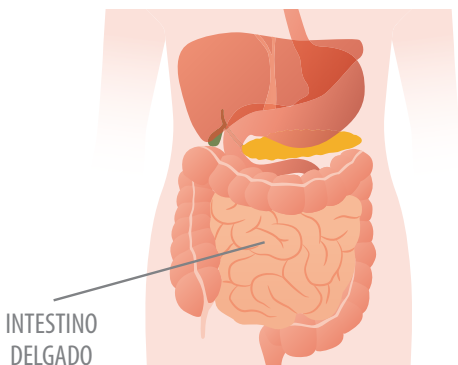

Como funciona a CapsoCam Plus?

A CapsoCam Plus grava um vídeo único em 360° do seu trato digestivo à medida que atravessa o seu sistema. O procedimento é fácil:

- *Proceda a uma preparação intestinal simples no dia anterior ao seu procedimento para assegurar uma visão limpa do seu intestino.*
- *Engula a cápsula com um copo cheio de água.*
- *Recupere a cápsula entre 3 a 30 horas após ser engolida, recorrendo a um processo de recuperação simples depois de sentir movimento intestinal.*
- *Envie a cápsula por correio ou entregue-a ao seu médico.*
- *O seu médico irá analisar o vídeo e partilhar os resultados consigo.*



A cápsula CapsoCam Plus tem, aproximadamente, o tamanho de uma multivitamina grande e pode ser engolida com um copo de água.

Irei sentir alguma dor?

Não deve sentir nenhuma dor ao ingerir a cápsula ou à medida que esta atravessa o seu trato digestivo. A cápsula CapsoCam Plus deve ser expelida naturalmente durante um movimento intestinal. Ao contrário de outros procedimentos endoscópicos, não será necessária sedação.

Como me devo preparar para tomar a cápsula?

Antes de ingerir a sua cápsula, forneça ao seu médico uma lista de todos os medicamentos que toma, alergias a medicamentos e problemas de saúde. O seu médico indicar-lhe-á quando deve iniciar o jejum. O mesmo também lhe facultará instruções pré e pós-procedimento. Para garantir as melhores hipóteses de sucesso, siga rigorosamente todas as instruções do seu médico.

“Os meus doentes ficam sempre surpreendidos com a facilidade com que conseguem engolir a cápsula CapsoCam Plus. E a recuperação da cápsula tem sido bastante fácil para eles.”

Michael Bass, Médico, Gastroenterologista
Especialistas GI de Delaware, Newark, DE

“ Quando lhes é dada a opção de escolha, os meus doentes preferem CapsoCam Plus. É muito mais simples. Só precisam de se deslocar ao consultório, ingerir a cápsula e retomar as suas atividades diárias normais sem que ninguém saiba que estão a ser submetidos a um procedimento.”

Ian Storch, Médico Osteopata, Gastroenterologista
Consultores de Gastroenterologia de Long Island, New Hyde Park, NY



Como recolho a cápsula?

Antes de ingerir a cápsula CapsoCam Plus, o seu médico irá fornecer-lhe o kit de recuperação CapsoRetrieve. Leve o kit para casa e leia prontamente as instruções de utilização. Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com o seu médico.

Pode igualmente consultar o website da CapsoVision, onde poderá ver um breve vídeo sobre o processo de recuperação da cápsula.



Também pode visitar o nosso website para ver um pequeno vídeo de instruções sobre como recuperar a cápsula CapsoCam Plus:

[https://capsovision.com/patient-resources/
what-to-expect-with-capsocam/](https://capsovision.com/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/)



O kit de recuperação CapsoRetrieve facilita a captura da cápsula.



1

Quando sentir que vai ocorrer um movimento intestinal, coloque o recipiente de recuperação dentro da sanita.



2

Se necessário, adicione água no recipiente para que seja mais fácil ver a cápsula.



3

Para recuperar a cápsula sem ter de usar as mãos, utilize a vareta magnética para recolher a cápsula do recipiente.



4

Coloque a cápsula no recipiente da cápsula. Pode utilizar a tampa do recipiente para separar a cápsula da vareta magnética.



5

Feche a tampa e entregue o recipiente da cápsula no consultório do seu médico.



OU

Ou, caso o seu médico lhe tenha fornecido um envelope FedEx® pré-pago, coloque o recipiente da cápsula dentro do mesmo e entregue-o numa instalação da FedEx.

O kit de recuperação CapsoRetrieve também contém um conjunto de instruções que o guiam e ajudam no processo de recuperação da cápsula. Leia as instruções com atenção e fale com o seu médico se tiver alguma dúvida.

Informações relativas à consulta do procedimento

Data do procedimento: _____

Dia do procedimento: _____

Hora do procedimento: _____

Dados de contacto:

Atenção: A lei federal restringe a venda deste dispositivo apenas por profissionais de saúde licenciados ou mediante prescrição médica.

Informações sobre os riscos

Embora sejam raros, todos os procedimentos de endoscopia por cápsula acarretam alguns riscos. As possíveis complicações incluem a aspiração e retenção da cápsula devido à obstrução do intestino delgado. A colocação endoscópica pode apresentar riscos adicionais associados ao procedimento. Pode ser necessária uma intervenção médica, endoscópica ou cirúrgica para resolver essas complicações, caso ocorram. Após a ingestão da CapsoCam Plus e até a cápsula ser expelida do organismo, os doentes não devem estar nas proximidades de campos eletromagnéticos fortes, como a RM, para evitar lesões. Peça mais informações ao seu médico.



CapsoVision.com