



Капсульная ЭНДОСКОПИЯ

Использование CapsoCam Plus[®]

Единственная капсула
с панорамным обзором на 360°


Если у вас имеется дефицит железа, болезнь Крона, глютеновая энтеропатия, кровотечение или анемия, врач может назначить вам капсульную эндоскопию для визуализационного исследования возможных патологических изменений в тонкой кишке (часть желудочно-кишечного тракта).

Capso **CAM**
PLUS

Разработано для удобства пациентов

Что такое капсульная эндоскопия?

Капсульная эндоскопия — это процедура, позволяющая врачу использовать для визуализационного обследования тонкой кишки крошечные камеры, расположенные внутри капсулы, которую проглатывает пациент. В эту область трудно проникнуть для обследования, используя традиционные более инвазивные эндоскопические процедуры.

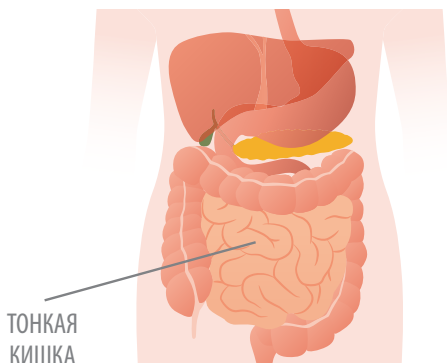

Каков принцип действия капсулы CapsoCam Plus?

CapsoCam Plus обеспечивает уникальную видеосъемку с обзором на 360°, когда капсула проходит через желудочно-кишечный тракт. Процедура проста:

- *Подготовьте кишечник за день до выполнения процедуры, чтобы обеспечить хороший обзор с камеры.*
- *Проглотите капсулу, запив ее полным стаканом воды.*
- *Через 3-30 часа опорожните кишечник и извлеките капсулу.*
- *Отправьте капсулу врачу по почте или отнесите ее лично.*
- *Врач ознакомится с видеозаписью и сообщит вам результаты.*



По размеру капсула CarsoCam Plus похожа на большую поливитаминную таблетку, и ее можно проглотить, запив несколькими глотками воды.

Будете ли вы испытывать боль?

Вы не должны испытывать какой-либо боли при проглатывании капсулы или во время ее прохождения через желудочно-кишечный тракт. Капсула CarsoCam Plus должна выйти естественным путем во время испражнения. Вам не потребуются седация, как при других эндоскопических процедурах.

Как подготовиться к введению капсулы?

Прежде чем использовать капсулу, предоставьте своему врачу список всех принимаемых лекарственных препаратов, укажите все имеющиеся аллергии на лекарства и медицинские диагнозы. Врач проинструктирует вас о том, когда следует воздержаться от принятия пищи. Он также предоставит вам инструкции касательно ваших действий до и после процедуры. Чтобы обеспечить успешный результат процедуры, тщательно следуйте всем инструкциям врача.

«Мои пациенты всегда удивляются, насколько легко им было проглотить капсулу CarsoCam Plus. Кроме того, извлечение капсулы также не вызывало каких-либо проблем».

Майкл Басс (Michael Bass), доктор медицины, гастроэнтеролог
Клиника GI Specialists of Delaware, Ньюарк (Делавэр)

«Если есть выбор, мои пациенты предпочитают использовать CapsoCam Plus. Они приходят, глотают капсулу и дальше могут заниматься своими обычными делами. Никто и не заметит, что они проходят процедуру эндоскопии».

Иэн Сторч (Ian Storch), доктор остеопатической медицины, гастроэнтеролог

Частная клиника Gastroenterology Consultants of Long Island, Нью-Гайд-Парк (Нью-Йорк)



Как получить капсулу?

Прежде чем вы проглотите капсулу CapsoCam Plus, врач предоставит вам комплект CapsoRetrieve. Заберите комплект домой и сразу же ознакомьтесь с инструкциями по его использованию. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, обязательно обсудите их со своим врачом.

Вы также можете посетить веб-сайт CapsoVision и посмотреть краткое видео об извлечении капсулы.



Вы также можете перейти на наш веб-сайт и посмотреть краткую видеоинструкцию об извлечении капсулы CapsoCam Plus:

<https://capsovision.com/patient-resources/>

[what-to-expect-with-capsocam/](https://capsovision.com/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/)



Комплект CapsoRetrieve помогает легко извлечь капсулу.



1

Когда почувствуете необходимость опорожнить кишечник, поместите контейнер для извлечения капсулы на заднюю часть сиденья унитаза.



2

При необходимости налейте в контейнер воду, чтобы было легче увидеть капсулу.



3

Воспользуйтесь магнитной палочкой, чтобы захватить капсулу в контейнере и извлечь ее.



4

Поместите капсулу в контейнер для капсул. Вы можете использовать крышку контейнера, чтобы отсоединить капсулу от магнитной палочки.



5

Закройте крышку и верните контейнер для капсул своему врачу.



ИЛИ

Если же врач выдал вам предоплаченный конверт FedEx®, поместите в него контейнер для капсул и сдайте его в любое отделение FedEx для отправки.

Комплект CapsoRetrieve также содержит инструкции по извлечению капсулы. Внимательно прочтите инструкции и обсудите с врачом любые возникшие у вас вопросы.

Информация о назначенной процедуре

Дата выполнения процедуры: _____

День выполнения процедуры: _____

Время выполнения процедуры: _____

Контактные данные:

Внимание! Федеральный закон разрешает продажу данного изделия только лицензированным медицинским работникам или по их назначению.

Информация о рисках

В редких случаях процедуры капсульной эндоскопии сопряжены с определенным риском. Возможные осложнения включают аспирацию и застревание капсулы из-за непроходимости тонкой кишки. Размещение эндоскопа может вызвать дополнительные риски при выполнении процедуры. Для устранения возникших осложнений может потребоваться медицинское, эндоскопическое или хирургическое вмешательство. После проглатывания капсулы CapsoCam Plus и до ее выведения из организма пациенты не должны находиться вблизи каких-либо сильных электромагнитных полей, например, возникающих при проведении МРТ, чтобы избежать травм. За дополнительной информацией обратитесь к своему врачу.



CapsoVision
empowering through innovation

CapsoVision.com