



# Kapslová endoskopie

---

pomocí kapsle CapsoCam Plus®  
Jediná kapsle s 360°  
panoramatickým rozhledem


*Pokud trpíte nedostatkem železa, Crohnovou chorobou, celiakií, krvácením nebo anémií, může váš lékař předepsat kapslovou endoskopii k vizualizaci možných abnormalit v tenkém střevě (části vašeho gastrointestinálního traktu).*

Capso **CAM**  
PLUS

Zkonstruováno k volnosti pacientů

# Co je to kapslová endoskopie?

Kapslová endoskopie je procedura, při které spolknete kapsli s miniaturními kamerami a lékař si může prohlédnout tenké střevo, když jí kapsle projde. Tato oblast je obtížně dostupná a zobrazitelná tradičními, více invazivními endoskopickými procedurami.

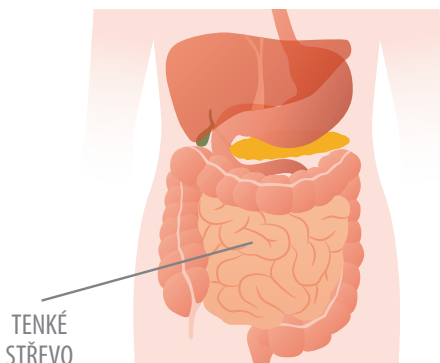

## Jak CapsoCam Plus funguje?

CapsoCam Plus pořizuje při průchodu tělem jedinečné 360° video vašeho zažívacího traktu.

Postup je jednoduchý:

- *Den před samotnou procedurou provedete snadnou očistu střev, aby byla při zobrazení dobře vidět.*
- *Kapsli při spolknutí zapijete plnou sklenicí vody.*
- *Za 3–30 hodin kapsli jednoduchým postupem vyzvednete, až půjdete na stolicí.*
- *Kapsli přinesete zpět lékaři.*
- *Lékař si prohlédne video a probere s vámi nálezy.*



---

*Kapsle CapsoCam Plus je  
přibližně velikosti velké  
multivitaminové kapsle  
a lze ji snadno spolknout  
s několika doušky vody.*

---

## Pocítím nějakou bolest?

Při polknutí kapsle ani jejím průchodu zažívacím ústrojím byste žádnou bolest pociťovat neměl(a). Kapsle CapsoCam Plus by měla přirozeně vyjít se stolicí. Na rozdíl od jiných endoskopických výkonů nebude potřeba žádná sedace.

## Jak se připravím na polknutí kapsle?

Než spolknete kapsli, dejte svému lékaři informace o všech užívaných lécích, alergiích na léky a onemocněních. Lékař vám řekne, kdy přestat jíst. Poučí vás také, jak postupovat před procedurou a po ní. Pečlivě dodržujte všechny pokyny svého lékaře, abyste maximalizoval(a) pravděpodobnost úspěchu procedury.

*„Procedura s kapslí CapsoCam Plus mým pacientům přijde velmi snadná a překvapuje je, jak jednoduché je kapsli spolknout a znovu vyzvednout.“*

MUDr. Thomas Pachofszky  
Oddělení gastroenterologie, hepatologie a endoskopie  
Nemocnice Rudolfstiftung, Vídeň, Rakousko

„Naše zkušenosti [s kapslí CapsoCam Plus] u pacientů jsou obecně vynikající. Žádná bolest, problémy či obtíže, je to velmi jednoduché.“

prof. MUDr. Jean Christophe Saurin  
Nemocnice E. Herriota, Lyon, Francie



## Jak kapsli vyzvednu?

Než kapsli CapsoCam Plus spolknete, lékař vám poskytne soupravu k jejímu vyzvednutí, CapsoRetrieve Kit. Soupravu si vezměte domů a ihned si přečtete návod k použití. Budete-li mít otázky, obraťte se na svého lékaře.

Můžete také navštívit webové stránky společnosti CapsoVision a podívat se na krátké video o postupu vyzvednutí kapsle.



***Můžete také navštívit naše webové stránky a podívat se na krátké video o tom, jak kapsli CapsoCam Plus vyzvednout:***

<https://capsovision.com/international/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/>



# Se soupravou CapsoRetrieve Kit je vyzvednutí kapsle snadné.



1

*Až budete potřebovat jít na stolicí, umístěte síto k vyzvednutí kapsle do zadní části záchodové mísy.*



2

*Pokud bude potřeba, propláchněte síto vodou, aby kapsli bylo lépe vidět.*



3

*Kapsli ze síta vyzvedněte bez dotýkání rukama magnetickou tyčkou.*



4

*Vložte kapsli do nádoby na kapsli. Víčko nádoby může posloužit k oddělení kapsle od magnetické tyčky.*



5

*Zavřete víčko a nádobu s kapslí vraťte svému lékaři.*

---

K soupravě CapsoRetrieve Kit jsou také přibalené pokyny, které vás provedou postupem vyzvednutí kapsle. Pozorně si je přečtete a s případnými otázkami se obraťte na svého lékaře.

# Informace o plánované proceduře

Datum procedury: \_\_\_\_\_

Den procedury: \_\_\_\_\_

Čas procedury: \_\_\_\_\_

## Kontaktní údaje lékaře:

## Informace o rizicích

Rizika jsou sice vzácná, ale do určité míry se pojí se všemi procedurami kapslové endoskopie. Možnými komplikacemi jsou vdechnutí a zadržení kapsle vzhledem k obstrukci tenkého střeva. Další rizika procedury se mohou pojít s endoskopickým zavedením. Pokud by se komplikace vyskytly, mohlo by si jejich řešení vyžádat lékařskou, endoskopickou nebo chirurgickou intervenci. V době mezi spolknutím a vyloučením kapsle CapsoCam Plus nesmí pacienti v zájmu prevence zranění být v blízkosti silných magnetických polí, např. magnetické rezonance (MR). Další informace si vyžádejte od svého lékaře.

## Distribuuje:



CapsoVision.com