



Endoscopie par vidéo- capsule

avec CapsoCam Plus[®]

La seule capsule disposant d'une
vision panoramique à 360 °


Si vous souffrez d'une carence en fer, de la maladie de Crohn, de la maladie coéliqua, de saignements ou d'anémie, votre médecin peut être amené à vous prescrire une endoscopie par capsule pour visualiser d'éventuelles anomalies à l'intérieur de votre intestin grêle (une partie de votre appareil digestif).

Capso **CAM**
PLUS

Conçu pour la liberté du patient

Qu'est-ce que l'endoscopie par vidéocapsule ?

L'endoscopie par vidéocapsule est un examen qui permet à votre médecin de visualiser votre intestin grêle à l'aide d'une capsule munie de caméras miniaturisées. Lorsque vous avalez la capsule, elle capture des images au cours du transit intestinal. L'intestin grêle est une zone difficile à atteindre et à visualiser en utilisant des procédures endoscopiques conventionnelles plus invasives.

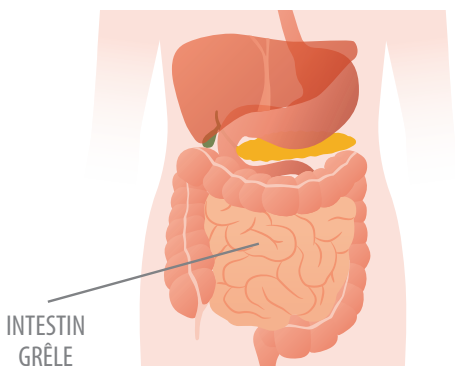

Comment fonctionne le système CapsoCam Plus ?

La capsule CapsoCam Plus capture une vidéo unique sur 360 ° de votre tube digestif, au fur et à mesure de son transit à l'intérieur de celui-ci. L'intervention est facile :

- *Afin d'optimiser la visualisation, réalisez une préparation simple de l'intestin un jour avant votre examen.*
- *Ingérez la capsule avec un grand verre d'eau.*
- *Récupérez la capsule 3 à 30 heures plus tard en suivant un simple procédé de récupération après être allé(e) à la selle.*
- *Postez ou apportez la capsule à votre médecin.*
- *Votre médecin va examiner la vidéo et vous fournir les résultats.*



La capsule CapsoCam Plus a environ la même taille qu'une grande gélule multivitaminée et peut être ingérée avec quelques gorgées d'eau.

Vais-je ressentir des douleurs ?

Vous ne devriez ressentir aucune douleur en ingérant la capsule ou lors de son transit dans le système digestif. La capsule CapsoCam Plus doit être éliminée naturellement dans les selles. Contrairement aux autres examens endoscopiques, aucune sédation n'est nécessaire.

Comment dois-je me préparer à prendre la capsule ?

Avant d'ingérer votre capsule, indiquez à votre médecin les médicaments que vous prenez, vos allergies aux médicaments et autres problèmes de la santé. Votre médecin vous indiquera quand vous devrez débiter le jeûne. Il vous donnera également des instructions à suivre avant et après l'examen. Afin d'obtenir les meilleurs résultats, veuillez respecter avec soin toutes les instructions de votre médecin.

« Mes patients trouvent que l'examen avec CapsoCam Plus est très simple à réaliser et ils sont surpris de constater à quel point il est facile d'ingérer et de récupérer la capsule. »

Thomas Pachofszky, docteur en médecine
Service de gastro-entérologie, d'hépatologie et d'endoscopie
Hôpital Rudolfstiftung, Vienne, Autriche

« Dans l'ensemble, notre expérience [avec CapsoCam Plus] est excellente pour le patient. Pas de douleurs, pas de problèmes, pas de difficultés et un procédé très simple. »

Prof. Jean Christophe Saurin, docteur en médecine
Hôpital Édouard Herriot, Lyon, France



Comment dois-je récupérer la capsule ?

Avant l'ingestion de la capsule CapsoCam Plus, votre médecin vous fournira un kit de récupération CapsoRetrieve. Emportez ce kit à la maison et lisez immédiatement son mode d'emploi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre médecin.

Vous pouvez également visiter le site Web de CapsoVision afin de visualiser une brève vidéo décrivant la procédure de récupération de la capsule.



Visitez notre site Web afin de visualiser une brève vidéo décrivant la procédure de récupération de la capsule CapsoCam Plus :

<https://capsovision.com/international/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/>



Le kit CapsoRetrieve permet de récupérer facilement la capsule.



1

Lorsque vous êtes prêt(e) à aller à la selle, placez le bassin de récupération à l'arrière de la cuvette des toilettes.



2

Si nécessaire, versez de l'eau dans le bassin pour que la capsule soit plus facile à repérer.



3

Utilisez la tige magnétique pour une récupération, « sans contact » avec les mains, de la capsule dans le bassin.



4

Placez la capsule à l'intérieur de son récipient. Vous pouvez utiliser le couvercle du récipient pour détacher la capsule de la tige magnétique.



5

Fermez le couvercle et rapportez le récipient au cabinet de votre médecin.

Le kit CapsoRetrieve contient aussi des instructions d'utilisation qui vous expliquent le procédé de récupération de la capsule. Lisez attentivement les instructions et consultez votre médecin si vous avez des questions.

Rendez-vous pour l'examen

Date de l'examen : _____

Jour de l'examen : _____

Heure de l'examen : _____

Coordonnées :

Information sur les complications possibles

Bien que rares, toutes les procédures d'endoscopie par capsule comportent quelques risques. Les complications possibles sont notamment la fausse route de la capsule vers la trachée et les bronches lors de l'ingestion et la rétention de la capsule en raison d'une occlusion de l'intestin grêle. La mise en place par endoscopie peut également présenter d'autres risques liés à l'intervention. Le cas échéant, une intervention médicale, endoscopique ou chirurgicale peut s'avérer nécessaire pour prendre en charge ces complications. Après ingestion de la capsule endoscopique CapsoCam Plus et jusqu'à son excrétion, les patients ne doivent pas être exposés à des champs magnétiques forts (tels que ceux utilisés dans l'IRM) pour éviter toute blessure. Renseignez-vous auprès de votre médecin pour de plus amples informations.

Distribué par :



CapsoVision.com