



Kapsulna endoskopija

s kapsulo CapsoCam Plus[®]

Edina kapsula s
panoramskim pogledom 360 °


Če trpite za pomanjkanjem železa, Crohnovo boleznijo ali celiakijo oziroma se srečujete s krvavenjem ali slabokrvnostjo, vas bo zdravnik morda želel napotiti na kapsulno endoskopijo, ki bo pokazala morebitne nepravilnosti v tankem črevesu (delu prebavnega trakta).

Capso **CAM**
PLUS

Za večjo svobodo bolnikov

Kaj je kapsulna endoskopija?

Kapsulna endoskopija je postopek, pri katerem se uporablja kapsula z vgrajenimi drobnimi kamerami. Kapsulo morate pogoltniti, da lahko zdravnik pregleda vaše tanko črevo med prehodom kapsule skozenj. Z uporabo tradicionalnih, invazivnejših endoskopskih postopkov je ta telesni predel težko doseči in pregledati.

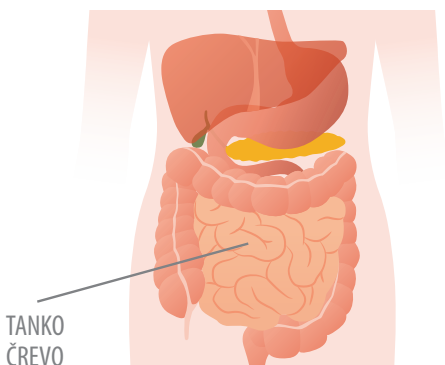

Kako deluje kapsula CapsoCam Plus?

Kapsula CapsoCam Plus ustvari edinstven, 360-stopinjski videoposnetek vaših prebavil, medtem ko potuje skozenje. Postopek je preprost:

- *Dan pred postopkom izvedite preprosto pripravo črevesa, ki bo zagotovila neoviran pregled.*
- *Kapsulo pogoltnite in popijte kozarec vode.*
- *Kapsulo ponovno pridobite 3–30 ur pozneje s preprostim postopkom povrnitve kapsule po odvajanju blata.*
- *Kapsulo vrnite zdravniku.*
- *Zdravnik bo pregledal videoposnetek in vas obvestil o ugotovitvah.*



Kapsula CapsoCam Plus je podobne velikosti kot večja multivitaminska tableta in se lahko pogoltne z nekaj požirki vode.

Ali je postopek boleč?

Med požiranjem kapsule ali njenim prehodom skozi prebavila ne boste občutili bolečine. Kapsula CapsoCam Plus bo zapustila telo po naravni poti, z odvajanjem blata. Za razliko od drugih endoskopskih postopkov ne boste potrebovali sedacije.

Kako naj se pripravim na zaužitje kapsule?

Pred zaužitjem kapsule dajte svojemu zdravniku seznam vseh zdravil, ki jih jemljete, alergij na zdravila in svojih zdravstvenih težav. Zdravnik vam bo povedal, kdaj se morate začeti postiti. Dal vam bo tudi navodila, ki jih boste morali upoštevati pred postopkom in po njem. Možnost za uspešen izid postopka bo najboljša, če se boste natančno držali zdravnikovih navodil.

»Mojim bolnikom se postopek s kapsulo CapsoCam Plus zdi zelo preprost; presenečeni so, kako lahko je kapsulo pogoltniti in jo dobiti nazaj.«

Dr. Thomas Pachofszky

Oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in endoskopijo

Bolnišnica Rudolfstiftung, Dunaj, Avstrija

»Naše splošne izkušnje [z uporabo kapsul CapsoCam Plus] pri bolnikih so odlične. Postopek je neboleč, poteka brez težav in je zelo preprost.«

Prof. dr. Jean Christophe Saurin
Bolnišnica E. Herriot, Lyon, Francija



Kako naj kapsulo dobim nazaj?

Preden boste pogoltnili kapsulo CapsoCam Plus, vam bo zdravnik dal komplet CapsoRetrieve. Komplet odnesite domov in takoj preberite priložena navodila za uporabo. Če imate kakršna koli vprašanja, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Lahko tudi obiščete spletno mesto CapsoVision, kjer je na voljo kratek videoposnetek o postopku povrnitve kapsule.



Poleg tega si lahko na našem spletnem mestu ogledate kratek videoposnetek o tem, kako dobiti kapsulo nazaj. Obiščite spletni naslov:

<https://capsovision.com/international/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/>



S kompletom CapsoRetrieve je kapsulo preprosto dobiti nazaj.



1

Ko ste pripravljeni na odvajanje blata, postavite posodo za povrnitev kapsule na zadnji del školjke.



2

Po potrebi v posodo nalijte vodo, da boste kapsulo lažje videli.



3

Za prostoročno povrnitev kapsule uporabite magnetno palico, ki omogoča zajem kapsule iz posode.



4

Kapsulo dajte v posodico za kapsulo. Za odstranitev kapsule z magnetne palice lahko uporabite pokrovček.



5

Zaprite pokrovček in posodico s kapsulo vrnite zdravniku.

Komplet CapsoRetrieve vsebuje tudi navodila, ki vas bodo vodila skozi postopek povrnitve kapsule. Navodila natančno preberite in se posvetujte z zdravnikom, če imate kakršna koli vprašanja.

Informacije o naročanju na postopek

Datum postopka: _____

Dan postopka: _____

Ura postopka: _____

Kontaktni podatki zdravnika:

Informacije o tveganju

Vsi postopki kapsulne endoskopije vključujejo določeno tveganje, čeprav so težave redke.

Možni zapleti vključujejo aspiracijo in zadržanje kapsule zaradi zapore tankega črevesa. Endoskopska namestitvev lahko predstavlja dodatna tveganja pri postopku. Če pride do teh zapletov, bo morda potreben zdravniški, endoskopski ali kirurški poseg. Po zaužitju kapsule CapsoCam Plus in dokler se kapsula ne izloči, bolniki ne smejo biti v bližini močnih elektromagnetnih polj, kot je magnetnoresonančno, da ne pride do poškodb. Več informacij lahko dobite pri svojem zdravniku.

Distributer:



CapsoVision
empowering through innovation

CapsoVision.com