

Ejemplo* de instrucciones de preparación de CapsoCam Plus®

*Estas instrucciones destinadas a médicos presentan un ejemplo de preparación del paciente que facilita la limpieza del intestino delgado y favorece la obtención de resultados óptimos con el procedimiento. El médico debe tener en cuenta el estado de cada paciente antes de ordenar unas instrucciones de preparación en concreto. Los pacientes con problemas conocidos de motilidad (p. ej., retraso en la evacuación gástrica, retención gástrica, estreñimiento frecuente, dificultad de acceso para colonoscopia, etc.) pueden precisar modificaciones en la preparación o una preparación más enérgica.

Esta preparación ha sido desarrollada por médicos junto con sus pacientes con el objetivo de alcanzar tres criterios de valoración principales: (1) visualización óptima del intestino delgado, (2) tránsito más rápido de la cápsula y (3) deposiciones más blandas que faciliten la recuperación a fin de maximizar los resultados clínicos del estudio endoscópico con cápsula del paciente.

Instrucciones de preparación del paciente para endoscopia con cápsula CapsoCam Plus®

Cita para la ingesta matutina

*NOTA: Si está tomando suplementos de hierro por vía oral, debe interrumpir su administración durante 4 días completos antes de la prueba.

Su procedimiento de endoscopia con cápsula está programado en: _____

Dirección: _____

Día _____ Fecha _____ Hora _____

Día antes del procedimiento

| | |
|---------------------|--|
| Día: | Desayune normalmente y tome un almuerzo ligero. A continuación, comience con una dieta líquida clara durante el resto del día/noche antes del procedimiento. (No tomar ninguna bebida de color rojo). |
| Día: Hora: 19:00 | Mezcle 7 tapones (119 g) de polietilenglicol (marcas MiraLAX®, ClearLax®, PureLax®, GaviLax®, LavaClear®) con ~1 l de agua y beba todo el contenido. |
| Día: Hora: 21:30 | A las 21:30 horas, tome 0,6 ml de simeticona (Mylicon®) en gotas bien mezcladas con ~240 ml de agua. Esto ayudará a reducir la formación de burbujas en el tubo digestivo. No beba nada después de las 22:00 horas. Se permite beber pequeños sorbos de agua con la medicación. |

Día del procedimiento

| | |
|----------------------|--|
| Día: Hora: Mañana | Retrase la administración de la medicación hasta 2 horas después de haber ingerido la cápsula, a menos que el médico la considere necesaria, y luego tome pequeños sorbos de agua con la medicación. |
| Día: Hora: | Dos (2) horas antes del momento programado de ingesta de la cápsula, mezcle 1 tapón (17 gramos) de polietilenglicol (MiraLAX®, ClearLax®, etc.) con un vaso entero de agua. El frasco de polietilenglicol tiene un tapón medidor con marcas con capacidad para 17 g de polvo cuando se llena hasta la línea marcada. |
| Día: Hora: | Llegada a la consulta/clínica. |
| Hora: | Ingiera la cápsula CapsoCam Plus con 0,6 ml de simeticona (Mylicon®) en gotas mezcladas con ~240 ml de agua. |
| Hora: | Vuelva a tomar líquidos claros 2 horas después de haber ingerido la cápsula. |
| Hora: | Cuatro horas después de haber tomado la cápsula, mezcle 17 gramos de polietilenglicol (MiraLAX®, ClearLax®, etc.) con un vaso lleno de agua y bébaselo entero. |
| Hora: | Podrá comer un almuerzo ligero en cualquier momento después de tomar la última dosis de polietilenglicol (MiraLax®, ClearLax, etc.). Anote lo que coma para el almuerzo. _____ Cene normalmente. No se imponen más restricciones alimenticias. |

Información importante para el paciente

- Siga al pie de la letra estas instrucciones para obtener resultados óptimos. En general, la cápsula tarda entre 3 y 30 horas en ser expulsada. Llame al médico si aún no ha evacuado la cápsula 72 horas después de haberla ingerido.
- Para ver el vídeo de instrucciones de recuperación, visite:

<https://capsovision.com/international/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/>



- Siga al pie de la letra las instrucciones de recuperación hasta conseguir recuperar la cápsula y así evitar tener que repetir el procedimiento. Utilice la bandeja de recuperación hasta haber recuperado la cápsula.
- Devuelva la cápsula a su médico de acuerdo con las instrucciones facilitadas.

Devolución de la cápsula: opciones elegidas por su profesional sanitario

- Coloque la cápsula dentro del recipiente correspondiente. Asegúrese de que la tapa del recipiente esté cerrada. Entregue la cápsula en la consulta del médico durante el horario de atención habitual.

Llame a nuestra consulta al teléfono: _____ si tiene cualquier pregunta.

Adquisición de la medicación de preparación

Nota: La medicación de preparación viene en diversos tamaños: al adquirir la medicación de preparación, asegúrese de obtener una cantidad suficiente para toda la preparación.

Polietilenglicol (marcas MiraLAX®, ClearLax®, PureLax®, GaviLax®, LavaClear®). Adquiera recipientes que tengan como mínimo capacidad para 153 g (es probable que le sobre).

Simeticona (Mylicon®) en gotas: el frasco más pequeño posible, ya que solo necesitará 1,2 ml en total.