

Exemple* d'instructions de préparation à l'intervention CapsoCam Plus®

* Instructions de préparation des patients fournies aux médecins à titre d'exemple pour permettre de nettoyer l'intestin grêle et garantir la réussite de l'intervention. Le médecin doit prendre en compte l'état de santé de chaque patient avant de prescrire des instructions de préparation. Les patients qui présentent des troubles de motilité connus (p. ex. ralentissement du transit gastrique, rétention gastrique, constipation fréquente, difficulté d'accessibilité pendant la coloscopie, etc.) peuvent nécessiter une préparation plus poussée ou modifiée.

Cette préparation a été mise au point par des médecins auprès de leurs patients pour satisfaire à trois critères principaux : (1) visualisation optimale de l'intestin grêle, (2) évacuation accélérée de la capsule et (3) amollissement des selles pour faciliter la récupération en vue d'optimiser les résultats de l'endoscopie par vidéocapsule de leurs patients.

Instructions de préparation des patients à une endoscopie par vidéocapsule avec CapsoCam Plus®

Rendez-vous après ingestion matinale

*REMARQUE : si vous prenez un supplément de fer par voie orale, veuillez arrêter la prise 4 jours complets avant l'intervention.

Votre endoscopie par vidéocapsule aura lieu à : _____

Adresse : _____

Jour _____ Date _____ Heure _____

Jour précédant l'intervention

| | |
|---------------------------|--|
| Jour : | Prenez un petit-déjeuner normal, suivi d'un déjeuner léger. Consommez ensuite uniquement des liquides clairs pendant le reste de la journée/soirée précédant l'intervention (aucun liquide de couleur rouge). |
| Jour : Heure : 19 h | Mélangez 7 bouchons (119 g) de polyéthylène glycol (MiraLAX®, ClearLax®, PureLax®, GaviLax®, LavaClear®) dans 1 litre d'eau et buvez le mélange dans sa totalité. |
| Jour : Heure : 21 h 30 | À 21 h 30, prenez 0,6 ml de gouttes de siméticone (Mylicon®) dans 240 ml d'eau. Cela réduira la formation de bulles dans votre appareil digestif. Ne buvez rien après 22 h. Vous pouvez prendre de petites gorgées d'eau pour avaler vos médicaments. |

Jour de l'intervention

| | |
|-------------------------|--|
| Jour : Heure : matin | Ne prenez vos médicaments que 2 heures après avoir avalé la capsule, à moins que votre médecin en décide autrement ; prenez-les alors avec de petites gorgées d'eau. |
| Jour : Heure : | Deux (2) heures avant l'heure prévue d'ingestion de la capsule, mélangez 1 bouchon (17 g) de polyéthylène glycol (MiraLax®, ClearLax®, etc.) dans un grand verre d'eau. Le bouchon de la bouteille de polyéthylène glycol est un bouchon-doseur gradué qui contient 17 g de poudre, une fois rempli jusqu'au repère indiqué. |
| Jour : Heure : | Arrivée au cabinet/à la clinique. |
| Heure : | Avalez la capsule CapsoCam Plus avec un mélange de 0,6 ml de gouttes de siméticone (Mylicon®) et de 240 ml d'eau. |
| Heure : | Reprenez le régime liquide 2 heures après avoir avalé la capsule. |
| Heure : | Quatre heures après avoir avalé la capsule, mélangez 17 g de polyéthylène glycol (MiraLax®, ClearLax®, etc.) dans un grand verre d'eau et buvez le mélange dans sa totalité. |
| Heure : | Vous pouvez prendre un déjeuner léger à votre convenance après la dernière dose de polyéthylène glycol (MiraLax®, ClearLax®, etc.). Veuillez indiquer ce que vous avez mangé au déjeuner : _____ Mangez normalement au dîner. Aucune restriction alimentaire supplémentaire n'est nécessaire. |

Informations importantes pour les patients

- Pour garantir des résultats optimaux, suivez les instructions à la lettre. La capsule sera en général évacuée en 3 à 30 heures. Si vous n'avez pas évacué la capsule 72 heures après son ingestion, contactez votre médecin.

- Pour regarder une vidéo sur la récupération de la capsule, rendez-vous sur le site

<https://capsovision.com/international/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/>



- Pour éviter une nouvelle endoscopie, veuillez suivre les instructions données jusqu'à la récupération de la capsule. Continuez d'utiliser le bassin de récupération jusqu'à ce que la capsule soit récupérée.

- Rapportez la capsule chez votre médecin, comme indiqué.

Renvoi de la capsule : options choisies par votre prestataire de soins

Placez la capsule à l'intérieur de son récipient. Assurez-vous de bien fermer le couvercle du récipient de la capsule. Rapportez la capsule au cabinet du médecin pendant les heures normales d'ouverture.

Veuillez appeler notre bureau au numéro _____ si vous avez des questions.

Achat des médicaments de préparation

Remarque : les médicaments de préparation sont vendus en plusieurs tailles : lorsque vous achetez vos médicaments de préparation, assurez-vous que la quantité est suffisante pour l'ensemble de la préparation.

Polyéthylène glycol (MiraLAX®, ClearLax®, PureLax®, GaviLax®, LavaClear®) : achetez un ou des emballages contenant au moins 153 g (il vous en restera probablement).

Gouttes de siméticone (Mylicon®) : la plus petite bouteille possible, vous n'aurez besoin que de 1,2 ml au total.