

Esempio* di istruzioni per la preparazione di CapsoCamPlus®

* Le presenti istruzioni intendono fungere da esempio per il medico che dovrà spiegare la preparazione al paziente, al fine di svuotare l'intestino tenue e contribuire al successo della procedura. Nel prescrivere le istruzioni di preparazione, il medico dovrà tenere in considerazione le condizioni individuali di ciascun paziente. In particolare, i pazienti con alterata motilità intestinale nota (ad es. ritardato svuotamento gastrico, ritenzione gastrica, stitichezza frequente, difficoltà di preparazione alle colonscopie, ecc.) potrebbero necessitare di una preparazione più vigorosa o di altro tipo.

La presente preparazione è stata sviluppata da medici sui propri pazienti al fine di conseguire tre obiettivi principali: (1) visualizzazione ottimale dell'intestino tenue, (2) massima rapidità di passaggio della capsula e (3) produzione di feci estremamente molli per facilitare il recupero, al fine di massimizzare l'esito clinico dello studio endoscopico con videocapsula del paziente.

Istruzioni per la preparazione del paziente per enteroscopia con videocapsula con CapsoCam Plus®

Appuntamento mattutino per l'ingestione

*NOTA - Se il paziente sta assumendo integratori di ferro per bocca, dovrà interromperne l'assunzione 4 giorni interi prima dell'esame.

La procedura di enteroscopia con videocapsula è programmata presso: _____

Indirizzo: _____

Giorno _____ Data _____ Ora _____

Il giorno prima della procedura

Giorno:	Consumare la consueta colazione, mentre il pranzo dovrà essere leggero. Iniziare quindi una dieta a base di liquidi trasparenti e proseguirla per il resto del giorno e della sera prima della procedura (evitare bevande di colore rosso).
Giorno: Ora: 19:00	Mescolare 119 g di polietilenglicole (prodotti come Isocolan o Selg Esse) con 950 ml di acqua e bere il tutto.
Giorno: Ora: 21:30	Alle 21:30 assumere 0,6 ml di simeticone (Mylicon®) gocce disperso in 240 ml di acqua. In questo modo si riduce la formazione di gas nello stomaco e nell'intestino. Non bere più nulla dopo le 22:00, salvo piccoli sorsi d'acqua per assumere eventuali farmaci consentiti.

Il giorno della procedura

Giorno: Ora: mattina	Evitare di assumere farmaci per 2 ore dopo aver inghiottito la capsula, a meno che il medico non lo ritenga necessario, nel qual caso ingerirli con piccoli sorsi d'acqua.
Giorno: Ora:	Due (2) ore prima di inghiottire la capsula, mescolare 17 g di polietilenglicole (come Isocolan o Selg Esse) con un bicchiere pieno di acqua.
Giorno: Ora:	Presentarsi all'ambulatorio/studio.
Ora:	Inghiottire la capsula CapsoCam Plus con 0,6 ml di simeticone (Mylicon®) gocce in 240 ml di acqua.
Ora:	Riprendere l'assunzione di liquidi trasparenti 2 ore dopo aver inghiottito la capsula.
Ora:	Quattro ore dopo aver inghiottito la capsula, mescolare 17 g di polietilenglicole (come Isocolan o Selg Esse) in un bicchiere pieno di acqua e bere il tutto.
Ora:	È possibile consumare un pranzo leggero in qualsiasi momento dopo aver bevuto l'ultima dose di polietilenglicole (come Isocolan o Selg Esse). Indicare cosa si è mangiato per pranzo. _____ Consumare una cena normale. Non sono necessarie ulteriori limitazioni dietetiche.

Informazioni importanti per il paziente.

- Per ottenere risultati ottimali, attenersi scrupolosamente alle istruzioni. La capsula impiega generalmente dalle 3 alle 30 ore per completare il transito intestinale. Se non viene evacuata entro 72 ore dall'ingestione, contattare il medico.

- Per guardare il video di istruzioni per il recupero della capsula, visitare il sito

<https://capsovision.com/international/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/>



- Per evitare di dover ripetere questo esame, è importante attenersi alle istruzioni sino all'effettivo recupero della capsula. Continuare a usare il vassoio fornito sino al recupero della capsula.

- Restituire la capsula al medico come da istruzioni.

Restituzione della capsula: opzione scelta dal medico

Inserire la capsula nell'apposito contenitore. Verificare che il coperchietto del contenitore sia chiuso. Restituire la capsula all'ambulatorio medico durante il normale orario di apertura.

Per qualsiasi domanda, contattare l'ambulatorio al numero: _____.

Acquisto del farmaco preparatorio

Nota - Il farmaco preparatorio è disponibile in diversi formati. Accertarsi al momento dell'acquisto di disporre di una quantità di farmaco sufficiente a completare tutta la preparazione.

Polietilenglicole (prodotti come Isocolan o Selg Esse): acquistare in quantità sufficiente per disporre di almeno 153 g di prodotto (potrebbe avanzarne un poco).

Simeticone (Mylicon®) gocce: la confezione più piccola possibile; ne serviranno solo 1,2 ml in tutto.